

UKdental original campaign



What we can do
For our customers
For our patients
For the dental industry



キャンペーン期間 2024年 8月 1日～

100本限定

※キャンペーン最終日は午前10時までの受注分までとさせていただきます。

今回のUKオリジナル企画商品は

歯科用器具・バキューム用洗浄剤 <防錆剤配合>

MedShine デンタルマルチクリーナー 数量限定

UKオリジナルセットの為、キャンペーン期間中に限らず在庫がなくなり次第終了となります。予めご了承ください。

器具の浸漬洗浄

器具の超音波洗浄

バキューム洗浄

の3つの用途の
洗浄剤がこれ **1本**

スタッフの教育が楽

洗浄

除菌

アルカリ性

3つの用途の洗浄剤を1つにまとめられるため、用途別に洗浄剤を覚える必要が無く、**スタッフの教育が楽**になります。

洗浄剤の管理が楽

高濃度タイプで経済的

洗浄剤の種類を集約できるため、**洗浄剤の管理が楽**になり、集約により**在庫スペースも削減**できます。

独自の技術で濃縮、薄めて使用出来ます。
薄めても洗浄力があり、経済的です。



3つの用途の希釈倍率をすべて50倍に統一することが可能です。
※汚れに応じて希釈倍率を変えることも出来ます。

成分情報

液性：アルカリ性

成分：界面活性剤（脂肪酸カリウム）、溶剤、金属イオン封鎖剤
アルカリ剤（水酸化カリウム）、除菌剤、防錆剤

使用上の注意

- 作業時は保護メガネおよびおおよび炊事用手袋を着用する。
- ステンレス（SUS304、430）以外の金属器具及び樹脂の種類によっては変化をきたす場合があるため、予め試験をしてから使用する。
- アルミおよび石英ガラスには使用できません。
- 使用後は手をよく水で洗う。
- キャップを開ける時、液が飛び出す恐れがあるので、注意しながら開ける。また、容器を移動する時は、キャップをしっかり閉める。緩んでいると、キャップが外れ、液が飛び跳ねて目に付く恐れがある。
- 用途以外には使用しない。
- 使い終わった容器はよく洗ってからつぶして処理する。

洗浄作業を
効率化



100本限定

ポンプと
出し口を添付



UKdental original campaign 「MedShine デンタルマルチクリーナー」 専用注文書

キャンペーン期間

2024年 8月 1日～

100本限定

※キャンペーン最終日は午前10時までの受注分までとさせていただきます。

※限定数に達し次第キャンペーン終了となります。予めご了承ください。

歯科用器具・バキューム用洗浄剤 <防錆剤配合>

MedShine
デンタルマルチクリーナー

容量 5kg（1ケース4本入）標準価格 ￥4,000（税抜）

数量

本

貴医院名

UK DENTAL

ご不明な点等ございましたら弊社営業までお問合せ下さい。

