

UKDENTAL OEM PENETRATION

キャンペーン期間

2024年

2025年

12/23 - 2/20

※キャンペーン最終日は午前10時
ご注文分までとさせていただきます。

2024年12月23日～2025年 2月20日 は下記商品を期間限定にて **特別価格** でご奉仕いたします。

対象商品 アルギン酸塩印象材用清掃液

UKトレークリーナーリキッド

容量 4,000ml
標準価格 5,600円 (税抜)

トレーに付着した印象材を強力に剥離溶解します。
抗菌成分配合により雑菌の増殖を防ぎ、防錆剤が各
種金属トレーの腐食を抑制します。液体タイプのため
溶液の調整が容易です。

剥がす

溶かす

強力な剥離効果と
溶解力を持つ
ツインモード

用 途 : アルギン酸塩印象材の清掃除去

主 成 分 : リン酸塩・界面活性剤

標準使用量 : 印象材を剥がす時は原液、溶かす場合は5～20倍
に希釈する。溶液1Lで使用済みトレー数個を処
理する。液の交換は一週間を目安とし、溶解力が
低下したときに全量交換する。

使用方法 : ① フタ付きのガラス又はポリ容器に溶液を調整する。
② 剥がす時は現役に印象材のついたトレーを30分から 1時間浸漬する。
③ 溶かす場合は希釈液に数時間～1日浸漬後取り出し、
軟化残存する印象材はブラシ等で除去する。
④ 清掃後は流水でじゅうぶんに水洗する。

使用上の注意 : ●使用時は、保護具を着用する。
※保護具とはゴーグル、炊事手袋、防護衣等
●トレーはすべて液中に浸漬すること、
浸漬できていない部分があると、トレーの錆・変色の原因となる。
長時間トレーを浸漬すると、トレーが変色する場合がある。
●ほかの薬剤、洗浄剤とは混ぜない。
●直射日光を避け、子供の手の届かないところに保管する。
●その他、安全にじゅうぶん注意して使用する。

※ご使用前に必ず「使用方法」と「使用上の注意」をお読みください。

警告

・皮膚の刺激・強い眼刺激

※洗浄成分の性質上、黒色物（成分の凝集物）が
発生する場合がありますが、安全性及び性能に
影響ありません。

中性
タイプ

強力な剥離効果と溶解力
を持つツインモードの
トレークリーナーです。

防錆成分配合 により、
金属トレーの腐食を防ぎます。

除菌成分 が溶液を清潔に保ちます。

〈 発売元 〉 UK DENTAL 〒862-0967 熊本県熊本市南区流通団地1丁目63番地

UKDENTAL OEM PENETRATION #1-2 『UKトレークリーナーリキッド』注文書

キャンペーン期間 : 2024年12月23日～2025年 2月20日

※キャンペーン最終日は午前10時ご注文分までとさせていただきます。

製品名 アルギン酸塩印象材用清掃液

UKトレークリーナーリキッド 4,000ml

数量

貴院名

UK DENTAL 詳しくは担当営業までお問合せください。