

UKDENTAL OEM PENETRATION

キャンペーン期間

2024年

8/21 - 10/18

※キャンペーン最終日は午前10時までの
受注分までとさせていただきます。

2024年8月21日～10月18日は下記商品を期間限定にて **特別価格** でご奉仕いたします。

対象商品

歯科用小器具洗浄除菌防錆液

UKネクストクリンⅡ 容量 4,000ml
標準価格 9,700円(税抜)

優れた洗浄力で血液、脂肪、蛋白質、膿汁などの有機物を除去する
歯科用小器具洗浄除菌防錆液です。

強力な洗浄力

洗浄成分に蛋白質分解酵素を
加え洗浄力がアップしました。

確実な除菌力

CAE、アルキルジアミノエチルグリ
シンによる確実な除菌効果。

安心の防錆力

非亜硝酸系有機防錆剤の配合に
より金属の腐食発生を防止

プラスの効果

ミントの香りで嫌な
臭いを軽減

さらに経済的

幅広い濃度で使用で
きるため経済的

※ご使用前に必ず「使用上の注意」と「用法・容量」をお読みください。

用 途： 歯科用小器具の洗浄、除菌及び防錆
ステンレス器具類の洗浄及び除菌

主 成 分： 高級アルコール系非イオン界面活性剤
CAE・アルキルジアミノエチルグリシン
非亜硝酸系有機防錆剤・蛋白質分解酵素・香料

使用方法： ●小器具類（リーマー、バー）

浸漬洗浄

2～10倍希釈液に10分浸漬した後、十分にすすいでください。

超音波洗浄機

10～20倍希釈液で10分洗浄してください。

●器具類（インスツルメント類）

浸漬洗浄

50～100倍希釈液に30分以上浸漬した後、十分にすすいでください。

超音波洗浄機

100～200倍希釈液で10分洗浄してください。

※液の交換は汚れの程度によりですができるだけ早めに交換してください。

※本剤はまれに沈殿を生ずることがありますが、性能には影響はありません。

※洗浄後の器具類は滅菌処理をしてください。

UKネクストクリンⅡ

歯科用小器具洗浄除菌防錆液
CAE・酵素配合 ミントの香り

UK
NET. 4L



危険

〈発売元〉UK DENTAL

〒862-0967

熊本県熊本市南区流通団地1丁目63番地

UKDENTAL OEM PENETRATION #9-10 『UKネクストクリンⅡ』注文書

キャンペーン期間：2024年8月21日～2024年10月18日

※キャンペーン最終日は午前10時までの受注分までとさせていただきます。

製品名 歯科用小器具洗浄除菌防錆液

UKネクストクリンⅡ 4000ml

数量

貴院名

UK DENTAL

詳しくは担当営業までお問合せください。

