

UK DENTAL OEM PENETRATION



2026

5/21

2026

7/20

2026年5月21日～2026年7月20日は

下記商品を期間限定にて **特別価格** でご奉仕いたします。

※キャンペーン最終日は午前10時ご注文分までとさせていただきます。

対象商品 義歯用除菌洗浄剤 **歯科医院専用**

UKデンチャークリーナー・プロ

折りたたんで捨てられる
減容ボトルを採用。

特徴

- デンチャープラーク、ステインを素早く分解除去します。
- 義歯性口内炎や口臭の原因菌を強力に除菌します。
- クラスプ、金属床などの金属材料にも安心して使用できます。

必ず使用前に「使用上の注意」と「使用方法」をお読みください。

用途：義歯、その他（クラウン、ブリッジ、リテーナー、スプリント、マウスガードなど）の除菌洗浄

主成分：次亜塩素酸ナトリウム（2％）、洗浄力強化剤、界面活性剤、防錆剤

液性：アルカリ性

- 使用方法：
- ① 義歯、その他の洗浄物をガラス製の洗浄容器に入れてください。
 - ② 本剤を水で2倍（汚れに応じて原液～3倍）に希釈し、洗浄容器に入れてください。
※洗浄物が完全に浸るように液量を調整してください。
※本剤は使用時に希釈してください。
 - ③ 洗浄容器を超音波洗浄器に入れ、5～10分間洗浄します。
※汚れの除去状態に応じて洗浄時間を調整してください（最大30分間）。
 - ④ 洗浄容器から洗浄液を捨て、そのまま水で2～3回すすいでください。
 - ⑤ 洗浄容器に新しい水を入れ、約5分間超音波洗浄してください。

使用上の注意

- 本剤を直接超音波洗浄器に入れて使用しないでください。
- 酸性製品とは絶対に混ぜないでください。
有害な塩素ガスが発生して危険です。
- 他の製品と混ぜて使用しないでください。
- 用途以外には使用しないでください。
- 金属を変色させることがあるため、
本剤へ長時間浸漬しないでください。
- アルミ製品には使用しないでください。
- 原料由来成分の沈殿が発生する場合がありますが
使用上問題はありません。
- 高温・直射日光を避けて室温で保管してください。
- 子供の手の届かない所に保管してください。
- 衣類を脱色するので液の付着に注意してください。

応急措置

- 飲み込んだ場合：口をすすぐこと、無理に吐かせないこと。
- 皮膚又は、髪に付着した場合：直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと、皮膚を水又は、シャワーで洗うこと。
- 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。
次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。
その後も洗浄を続けること。
- 直ちに医師/製造者/供給者または所管官庁が指定する
緊急処置に関する情報源に連絡すること。

安全対策

- 使用前に取扱説明書（SDS等）を入手すること。
- 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
- 取扱い後はよく手を洗うこと。
- 保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面を着用すること。

使用後、ゴミとしてかさばらず、
スペースをとりません。



危険 成分：メタルけい酸ナトリウム9水和物
水酸化ナトリウム



製造元

株式会社 **UKデンタル**

熊本市南区流通団地1丁目68番地

UKDENTAL OEM PENETRATION #1 『UKデンチャークリーナー・プロ』注文書

キャンペーン期間：2026年5月21日～2026年7月20日

※キャンペーン最終日は午前10時ご注文分までとさせていただきます。

製品名 **UKデンチャークリーナー・プロ**

容量：2,000ml | 標準価格：7,200円

数量

貴院名

UK DENTAL

詳しくは担当営業までお問合せください。