

JAPAN DENTAL SUPPLY
UKDENTAL ORIGINAL - 2024 - No.1
JDS PREMIUM CAMPAIGN

2024-26-①

12 月号

キャンペーン期間

2024年11月21日～12月20日まで

2024年11月21日～12月20日は下記商品を期間限定 **特別価格** にてご奉仕いたします。

※キャンペーン最終日は午前10時までの受注分までとさせていただきます。

今月の厳選商品 ディスポーザブルエプロン

JDSエプロンドレープ

使い捨てでいつも清潔。院内の感染予防に！

歯科用 ディスポーザブルエプロン

+ ドレープ が一体化


今までなかった、歯科用ディスポーザブルエプロンとドレープが一体化した製品です。使い捨てでいつでも清潔、感染防止に有効的です。小児科などにも便利！



特許取得済み

定価 ¥2,200 (税抜)
入り数 1箱 100枚入り
カラー グリーン
サイズ W460XH580mm

吸水性のある表面
防水加工の裏面

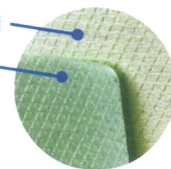

ドレープが
患者さんの目を覆い
緊張をほぐします

モニタリングされた先生のお話

今迄、診療に使用しクリーニングしただけのタオルを、患者さんのお顔に掛けても良いのだろうか悩んでいました。しかし一般診療用のシールなしディスポドレープは、位置がすぐにはずれてしまったり値段が高いので、なかなか使用するのが難しいと感じていました。しかしJDSエプロンドレープは、シールがなくとも位置がずれず、コストも歯科用エプロンと変わりません。エプロンドレープ両方の機能を併せ持つ分、コストパフォーマンスも良好です。そして何より患者さんに安心をアピールできます。



(東京都開業医)

使用方法

ドレープ使用時は開口部の切れ込みを鼻にかけ、オトガイ部を出すように装着することで位置がズレません。洗口時はドレープ部分を折り返すだけ！

位置がズレにくい
開口部の切れ込みを鼻にかけ、オトガイ部を出すように装着します

ドレープ
使用時



洗口時

ドレープ部分を折り返すだけ！



※開口量が大きく鼻に掛かりづらい患者さんには、一度お顔から外し鼻の切れ込み部分をハサミ等で切りサイズを調整してください。

JDS PREMIUM CAMPAIGN オリジナルキャンペーン 12月号『JDS エプロンドレープ』 注文書

キャンペーン期間 2024年11月21日～12月20日

※キャンペーン最終日は午前10時までの受注分までとさせていただきます。

商品名 JDSエプロンドレープ

定価 ¥2,200 (税抜) 入り数 1箱 100枚入り


カラー グリーン サイズ W460XH580mm

数量

箱

貴院名

担当営業名

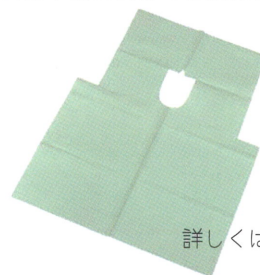

詳しくは担当営業までお問合せ下さい。

UK DENTAL