

# UKDENTAL OEM PENETRATION



2025年12月22日～2026年 2月20日 は下記商品を期間限定にて **特別価格** でご奉仕いたします。

※キャンペーン最終日は午前10時ご注文分までとさせていただきます。

対象商品 アルギン酸塩印象材用清掃液

## UKトレークリーナーリキッド

容量 4,000ml

標準価格 5,600円 (税込)

トレーに付着した印象材を強力に剥離溶解します。  
抗菌成分配合により雑菌の増殖を 방지、  
防錆剤が各種金属トレーの腐食を抑制します。  
液体タイプのため溶液の調整が容易です。

**強力な剥離効果と溶解力を持つ  
ツインモード**

用途：アルギン酸塩印象材の清掃除去

主成分：リン酸塩・界面活性剤

標準使用量：印象材を剥がす時は原液、溶かす場合は5～20倍に希釈する。溶液1Lで使用済みトレー数個を処理する。液の交換は一週間を目安とし、溶解力が低下したときに全量交換する。

- 使用方法：
- ① フタ付きのガラス又はポリ容器に溶液を調整する。
  - ② 剥がす時は現役に印象材のついたトレーを30分から1時間浸漬する。
  - ③ 溶かす場合は希釈液に数時間～1日浸漬後取り出し、軟化残存する印象材はブラシ等で除去する。
  - ④ 清掃後は流水でじゅうぶんに水洗する。

使用上の注意：●使用時は、保護具を着用する。

※保護具とはゴーグル、炊事手袋、防護衣等

●トレーはすべて液中に浸漬すること、浸漬できていない部分があると、トレーの錆・変色の原因となる。長時間トレーを浸漬すると、トレーが変色する場合があります。

●ほかの薬剤、洗浄剤とは混ぜない。

●直射日光を避け、子供の手の届かないところに保管する。

●その他、安全にじゅうぶん注意して使用する。

※ご使用前に必ず「使用方法」と「使用上の注意」をお読みください。

**警告**

・皮膚の刺激・強い眼刺激

※洗浄成分の性質上、黒色物（成分の凝集物）が発生する場合がありますが、安全性及び性能に影響ありません。

〈発売元〉UK DENTAL 〒862-0967 熊本県熊本市南区流通団地1丁目63番地

### UKDENTAL OEM PENETRATION #1-2 『UKトレークリーナーリキッド』注文書

キャンペーン期間：2025年12月22日～2026年 2月20日

※キャンペーン最終日は午前10時ご注文分までとさせていただきます。

製品名 アルギン酸塩印象材用清掃液

**UKトレークリーナーリキッド 4,000ml**

数量

貴院名

UK DENTAL 詳しくは担当営業までお問合せください。