

UKDENTAL OEM PENETRATION

キャンペーン期間

2025年

2025年

6/23 - 8/20

※キャンペーン最終日は午前10時
ご注文分までとさせていただきます。

2025年6月23日～2025年8月20日は下記商品を期間限定にて **特別価格** でご奉仕いたします。

対象商品 歯科用小器具洗浄除菌防錆液

UKネクストクリンⅢ

優れた洗浄力で血液、脂肪、蛋白質、膿汁などの有機物を除去する歯科用小器具洗浄除菌防錆液です。



特長



器具・器材の確実な消毒と滅菌の為にUKネクストクリンⅢをご利用ください。

強力な洗浄力

洗浄成分に蛋白質分解酵素を加え洗浄力がアップしました。

確実な除菌力



CAE、塩化セチルピリジニウムによる確実な除菌効果を発揮します。

安心の防錆力

非亜硝酸系有機防錆剤の配合により金属の腐食発生を防止します。

プラスの効果

ミントの香りで嫌な臭いを軽減します。

さらに経済的



幅広い濃度で使用できるため経済的です。

用途

歯科用小器具の洗浄、除菌及び防錆
ステンレス器具類の洗浄及び除菌

主成分

高級アルコール系非イオン界面活性剤
CAE・塩化セチルピリジニウム (CPC)
非亜硝酸系有機防錆剤
蛋白質分解酵素・香料

使用方法

- 小器具類 (リーマー、バー) 浸漬洗浄
2～10倍希釈液に10分浸漬した後、十分にすすいでください。
超音波洗浄機
10～20倍希釈液で10分洗浄してください。100～200倍希釈液で10分洗浄してください。
- 器具類 (インスツルメント類) 浸漬洗浄
50～100倍希釈液に30分以上浸漬した後、十分にすすいでください。
超音波洗浄機
100～200倍希釈液で10分洗浄してください。

内容量：4,000ml
標準価格：¥9,700 (税抜)

危険

※ご使用前に必ず「使用上の注意」と「用法・用量」をお読みください。



〈発売元〉UK DENTAL
〒862-0967
熊本県熊本市南区流通団地1丁目63番地

UKDENTAL OEM PENETRATION #7-8 『UKネクストクリンⅢ』注文書

キャンペーン期間：2025年6月23日～2025年8月20日

※キャンペーン最終日は午前10時ご注文分までとさせていただきます。

製品名 歯科用小器具洗浄除菌防錆液

UKネクストクリンⅢ 4,000ml

数量

貴院名

UK DENTAL 詳しくは担当営業までお問合せください。

