

UKDENTAL OEM PENETRATION

キャンペーン期間

2024年

10/21 - 12/20

※キャンペーン最終日は午前10時までの
受注分までとさせていただきます。

2024年10月21日～12月20日は下記商品を期間限定にて **特別価格** でご奉仕いたします。

対象商品 スピットン・バキューム用除菌洗浄剤

バイオハンター100

容量 2,000ml

標準価格 10,000円(税抜)

- ◇特許成分配合により、配管に付着した血液・唾液等の汚れ
バイオフィーム(細菌の温床)を強力に分解除去。
- ◇匂いの原因菌を徹底除菌。
- ◇防錆成分配合で金属部材にも安心。
- ◇廃棄しやすい減容ボトルを採用。
- ◇低発泡性。
- ◇50倍希釈で1本(2リットル)で100リットル分作れます。

排水ホースの
汚れや詰まり



血液・唾液等の汚れ
バイオフィームを強力
に分解除去!!

バキューム内の

細菌増殖

嫌な臭い

を定期的な洗浄ですっきりきれい

※ご使用前に必ず「使用上の注意」と「用法・容量」をお読みください。

用 途: スピットン・排水パイプ・バキューム
バキュームチップ

主 成 分: 酵素、界面活性剤、グリコール系溶剤
キレート剤、防錆剤、消泡剤

液 性: 弱アルカリ性

使用方法: ●スピットン・排水パイプ

- ①診療終了後、スピットンボウルと排水パイプに実用液を
200～500ml程度流し、翌朝まで放置してください。
- ②翌朝、診療開始前に水を200～500ml程度流してください。

●バキューム・排唾管

- ①診療終了後、バキュームまたは排唾管に実用液を200～500ml
程度吸引させ、翌朝まで放置してください。
- ②翌朝、診療開始前に水を200～500ml程度吸引させてください。

●バキュームチップ

- ①コップなどの容器に実用液を適量とり、
バキュームチップを30分以上浸漬してください。
- ②浸漬後、水でよくすすいでください。

※実用液: バイオハンター100 50倍希釈液

毎日の洗浄作業に
バイオハンター100を
お使い下さい。

低泡性

酵素配合

50倍希釈

2リットル

危険



※重篤な眼の損傷
※吸入すると有害
※神経系、呼吸器、腎の障害のおそれ
※長期にわたる又は反復ばく露による
神経系、呼吸器、腎の障害のおそれ
※水生生物に毒性

UKDENTAL OEM PENETRATION #11-12 『バイオハンター100』注文書

キャンペーン期間: 2024年10月21日～2024年12月20日
※キャンペーン最終日は午前10時までの受注分までとさせていただきます。

製品名 スピットン・バキューム用除菌洗浄剤

バイオハンター100 2000ml

数量

貴院名

UK DENTAL

詳しくは担当営業までお問合せください。

