

UK

UK REPORT

New Products

ネクストビジョン/ヨシダ
〈デジタルマイクロスコープ〉

ヨシダから発売された“ネクストビジョン”は、口腔内カメラと顕微鏡の機能を兼ね備えたマイクロスコープです。拡大された部位をモニターで確認しながら診療ができます。

【特徴】

- 4K 画質で 80 倍、2K 画質で最大 30 倍まで拡大できるので、より大きく鮮明な画像で歯面や根管の状態を細部まで確認することが可能です。
- マルチアングル機能を搭載した 3 軸機能なので、治療中に鏡筒部を自在にコントロールすることができます。
- オートフォーカス機能により、自動的にピント調整がされ、スムーズに治療ができます。
- 映像反転機能により、被写体を反転させて撮影することができ、患者さんに説明する際にかわりやすい画像を表示できます。

標準価格=本体一式 2,480,000 円

スケーラーest KIRIKO
/モリタ
〈シクルスケーラー〉

モリタより発売された“スケーラーest KIRIKO”は、製造工程を改善することで、滑沢な内刃とシャープな外刃のカッティングエッジを実現したシクルスケーラーです。さらに切れ味を長く持続させることが可能になりました。

【特徴】

- 日本製「YDM オリジナル刃物用ステンレス鋼」を採用し、新鋼材に適した条件の温度で熱処理を行い、素材の良さを活かした錆びにくい加工を施しています。
- 日本の伝統品である「江戸切子」をモチーフにし、見た目の美しさだけでなく、持ちやすく滑りにくいという特長も兼ね備え、安定したハンドル操作を行うことができます。
- 既存品のスケーラーest ペア（#1）に比べて、ブレードの厚み、カーブの形状をストレート気味にすることで、刃先の方向を認識しやすく、より歯間部へ挿入しやすくしています。
- #5/33と#H6/H7の2種類をラインナップ。#5/33は直と曲の薄いブレードの組合せて、前歯歯頸部や歯間部の歯肉縁上スクレーピングに適しています。また、#H6/H7はシャंकが左右にわずかに傾いており、前歯部から臼歯部の近遠心隅角部までアプローチが可能です。

標準価格=1本 各 4,800 円

DENT.チェックアップ
kodomo500/ライオン歯科材
〈フッ化物配合歯磨剤〉

ライオン歯科材から発売された“DENT.チェックアップ kodomo500”は、6歳未満のお子様に安心して使用できるフッ化ナトリウム 500ppmF 配合のソフトペーストです。人気のぶどう香味で、低発砲、低研磨、低香味なので少量の水ですすげます。

【特徴】

- お子様の好きな香味とキャラクターで、ブラッシング習慣の育成をサポートします。
- 少ない泡立ちで、やさしい香味。少量の水での洗口が可能です。
- 低研磨性により、歯や歯肉にやさしいペーストです。
- フッ素が口腔内のすみずみまで広がるソフトペーストです。
- カチオン化セルロースの配合により、フッ素の滞留性が向上します。

患者参考価格=60g入 250 円（税抜）

My Recommendation

『オパールエッセンス BOOST』
〈ウルトラデントジャパン〉

標準価格=患者キット 8,500 円
リフィル 14,500 円

ホワイトニングで人生が変わることがあります！

今回紹介させていただきます商品は、ウルトラデントジャパン(株)より発売されております『オパールエッセンス BOOST』です。この商品は歯科医院でスピーディーにオフィスホワイトニングが出来る薬材となっております。特徴としましては、


- ・薬材をシリンジ内で混合するため準備が簡単
 - ・赤いジェルで塗布部分がはっきりわかり、除去の際も簡単
 - ・20%以上の水分量を含むためエナメル質の脱水を防ぎ、知覚過敏が発生しにくい etc
- 実際に私自身も体感しましたが、「ホームホワイトニングで知覚過敏になったことがあり不安でしたが、事前にウルトラデントジャパン(株)より販売されておりますウルトラライズ（知覚過敏抑制剤）を併用することにより知覚過敏にはならず、また個人差はあると思いますが失活菌にも効果があり個人的にとっても満足しました。」オフィスホワイトニングのための専用機器が必要ないので導入しやすくなっておりますので一度この機会に弊社営業担当までお問合せ下さい。

鹿児島店 営業二課 齊藤 孝栄

The year-end Information

★年末・年始に向けてのご準備は万全ですか？

早いもので2019年も残りわずかとなりました。本レポートも今年最後になりますので、毎年恒例ではございますが、弊社アフターサービス課より年末に向けての“お手入れと点検”についてご紹介します。

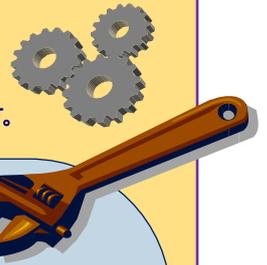

●診療室

①フィルターチェック

- ユニットの水・エアフィルターの有効期限確認。

②自動現像器

- タンククリーナー等を使用しタンク内の洗浄。
- ローラー部を中性洗剤で洗浄。
- ギア部を歯ブラシ等で洗浄。
※ローラー、ギアは水分を十分ふき取って下さい。
※現像・定着・水は来年の仕事始めに入れて下さい。

③電源

- 全ての診療機器をOFF又はコンセントを抜く。
- 動力（コンプレッサー、バキューム等）は、必ずOFFにしてください。

④給水

- 元栓を必ず締める。（特にテナントでご開業の医院様は忘れずに行ってください）

⑤ユニット

- バキュームホース内の洗浄。（現在ご使用中の専用クリーナーを十分に吸引させてください）
- 鉢洗いの洗浄。（同上にて専用クリーナーにて十分に洗浄してください。及び、網カゴやフィルターの洗浄も必要です）
- タービンやハンドピース等、各インスツルメント類の注油、及び洗浄。

●機械室

①水抜きチェック

- コンプレッサー
※オートトラップ自動水抜き付きの場合は作動を確認して下さい。
※特に寒冷地の医院様は、冬場は適時に水抜きを行わないと、コンプレッサーや配管内部で水が凍結し、エアが供給できなくなる可能性があります。また、使用しない年末年始間は、コンプレッサーに毛布を被せておくことも一つに手です。（始動時は必ず取り除いてください）
- トランスフォーマー（エア減圧器）
- エアドライヤー

②Vベルトチェック（駆動しているゴムベルト）

- コンプレッサー
- バキュームモーター
※ベルトのたるみ、ヒビの割れの確認が必要です。

③オイルチェック

- コンプレッサー（オイルフリータイプの場合除く）
※スクロールタイプは駆動時間のチェック。

●その他

- 石膏トラップ内の沈殿物除去と清掃
- 技工用バキューム及び口腔外バキュームのフィルターとダスト清掃。

★大掃除時のお手入れメモ★

- ユニット清掃作業として、鉢洗い内のネットフィルター、バキュームフィルター、排水トラップフィルターの清掃、セパレータータンク付きのユニットであれば、タンク内の清掃、排水弁の清掃を行うことで、年始のバキュームと排水つまりのトラブル解消に有効です。また、年始のユニット稼働時はコップ給水の水出しと、タービン等のインスツルメントをはずしての水出しを行うことにより、タービン内の水つまりの防止につながります。
- 取り外したタービン等インスツルメントにつきましては、十分な注油・洗浄を行い、使用メーカーごとの指定された保管状態での保管・管理をお願いします。
- ユニットの水フィルター及びエアフィルターは汚れていませんか？汚れが目に見えて確認できる状態であれば交換をオススメします。定期的な交換により、タービン注水の見詰まり防止やエアへの水の混入を防ぎます。
- ユニットやシートの汚れとりに、専用のクリーナーがあります。専用のクリーナーをお使いいただきますとシートのヒビ割れを起こしにくくし、長持ちにもつながります。
- 石膏トラップのお手入れに“石膏沈殿物処理剤”があります。とっても手軽に石膏トラップ内の沈殿物を取り除くことができ、清掃も簡単に行えます。年始の悪臭防止につながりますので、石膏トラップの清掃は必ず行っていただきますようお願いいたします。また、悪臭防止にトラップ内の悪臭をとる抗菌・除菌防臭剤もあります。
- 自動現像器の年明けの始動に、現像・定着液の在庫を今一度ご確認くださいませようお願いします。
- 年始の始動時、診療開始前にはまず十分な水（コップ給水やインスツルメント類）を出していただくようお願いいたします。休みの間に使用していなかったために水垢が出る可能性があります。

以上、導入されておられます機器によって多少の違いはありますが、一年間フルに稼働した機器類を来年もよりよい状況でお使いいただくためにも、是非各項目の にチェックマークを入れてご確認いただきますようお願いいたします。お気付きの点や詳細につきましては、弊社アフターサービス、または営業担当者までお気軽にお尋ね下さい。上記内容につきましてもご説明いたします。

◆◆◆編集後記◆◆◆

今年一年間、“UK レポート”のご愛読をいただき、誠にありがとうございました。記事内容につきましては、誤字・脱字等もあり大変ご迷惑をお掛けしたことをこの場をおかりしてお詫びいたします。来年も、変わらぬ“UK レポート”のご愛読の程、何卒よろしくお願い申し上げます。