

UK REPORT

New Products

プライムスキャン2 /デンツプライシロナ

＜クラウド型ワイヤレス口腔内スキャナー＞



デンツプライシロナから発売された“プライムスキャン2”は、シンプルさと多様性を兼ね備え、快適な診療をサポートするクラウド型ワイヤレス口腔内スキャナーです。

【特徴】

- クラウド型スキャナーで、スキャンデータを直接クラウドプラットフォーム (DS Core) に収集するので様々な場所でスキャン可能です。
 - スリムなヘッドを実現し、届きにくい部位のスキャンを容易にします。
 - インターネット接続があれば、専用のハードウェアが不要であらゆるコンピュータやモバイル機器で使用可能です。
 - 優れた精度と信頼性の高いスキャン品質により、診療の幅を広げられます。
 - LED ユーザーインターフェースでスキャナーの動作状態を把握できます。
 - 3個のバッテリーが付属します。
- ※Wi-Fi ネットワーク環境が必須です。

標準価格＝本体一式 4,500,000円

LM アルテ ダークダイヤモンド /白水貿易

＜歯科用コンポジットレジン充填器＞



白水貿易より発売された“LM アルテ ダークダイヤモンド”は、北欧生まれの人間工学に基づいた疲れにくい歯科用コンポジットレジン充填器です。

【特徴】

- シリコーンハンドルで滑りにくく、自然に把持できる形です。
- 疎水性が高く、レジン離れが良いので築盛や形態付与をスムーズに行えます。
- 表面が硬質で傷つきにくく低摩耗です。
- 表面が滑沢で清掃が容易です。
- 既製品のLMアルテ 12種から主要な5種をダークダイヤモンドにしています。
- 各インスツルメントはカラーコード化されており、使用・管理が容易です。

標準価格＝1本 9,500円

デュオトロン PRO T-7100 /サンデンタル

＜ジルコニア焼成用シンタリングファーンレス＞



サンデンタルより発売された“デュオトロンPRO T-7100”は、デュオトロンシリーズでフルスペック機能を搭載したジルコニア焼成用シンタリングファーンレスです。

【特徴】

- 最大 75 歯を一度に焼成可能な高出カプファーンレスです。
- 140 分以内でクイック焼成可能です。
- 50 個のスケジュール登録可能です。
- タッチパネル搭載でプログラムの設定が簡単です。
- 単冠からブリッジ、フルマウスも焼成可能です。
- 焼成プログラムのバックアップや更新が可能です。

標準価格＝本体のみ 1,980,000円

My Recommendation

『マウスギヤグ (開口器)』 ＜ヒューフレディ＞



標準価格＝1個 39,600円
交換用チップ 1,400円

一人でも容易に着脱可能！

今回ご紹介させていただきます商品は、ヒューフレディ・ジャパン合同会社より発売されております『マウスギヤグ』です。

スタッフさんがアシスタントに付けられない時や訪問診療時など、一人で処置しなければならない時、容易に開閉・ロック解除ができる形状でスタッフ不足の医院様でも安心してご使用いただける開口器です。噛む部分が広くしっかりホールドできるため、顎に不随意運動がある患者様などにも有効です。また、幼児用・小人用・大人用と3種類のサイズをラインナップしておりますので様々な患者様にご使用いただけます。

ご使用いただいているユーザー様からは、「操作も簡単で一人でも使用でき、忙しい時や往診先でも使用しやすい。」とのお声をいただいております。デモ機もご用意できますので是非ご体感いただき、購入ご検討ください。詳細は弊社営業担当者までお問い合わせ下さい。


長崎店 営業一課 植松 卓也

UK REPORT

The year-end Information

★年末・年始に向けてのご準備は万全ですか？

早いもので2024年も残りわずかとなりました。本レポートも今年最後になりますので、毎年恒例ではございますが、弊社アフターサービス課より年末に向けての“お手入れと点検”についてご紹介します。

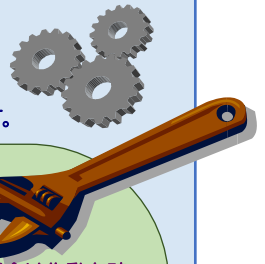

●診療室

①ユニット

- ユニットの水・エアフィルターの有効期限確認。
- バキュームホース内の洗浄。(現在ご使用中の専用クリーナーを十分に吸引させてください)
- 鉢洗いの洗浄。(同上にて専用クリーナーにて十分に洗浄してください。及び、網カゴやフィルターの洗浄も必要です)
- タービンやハンドピース等、各インスツルメント類の注油、及び洗浄。

②自動現像器

- タンククリーナー等を使用しタンク内の洗浄。
- ローラー部を中性洗剤で洗浄。
- ギア部を歯ブラシ等で洗浄。
※ローラー、ギアは水分を十分ふき取って下さい。
※現像・定着・水は来年の仕事始めに入れて下さい。

③電源

- 全ての診療機器をOFF又はコンセントを抜く。
- 動力(コンプレッサー、バキューム等)は、必ずOFFにしてください。

④給水

- 元栓を必ず締める。(特にテナントでご開業の医院様は忘れずに行ってください)

●機械室

①水抜きチェック

- コンプレッサー
※オートトラップ自動水抜き付きの場合は作動を確認して下さい。
※特に寒冷地の医院様は、冬場は適時に水抜きを行わないと、コンプレッサーや配管内部で水が凍結し、エアが供給できなくなる可能性があります。また、使用しない年末年始間は、コンプレッサーに毛布を被せておくことも一つに手です。(始動時は必ず取り除いてください)
- トランスフォーマー(エア減圧器)
- エアドライヤー

②Vベルトチェック(駆動しているゴムベルト)

- コンプレッサー
- バキュームモーター
※ベルトのたるみ、ヒビの割れの確認が必要です。

③オイルチェック

- コンプレッサー(オイルフリータイプの場合除く)
※スクロールタイプは駆動時間のチェック。

●その他

- 石膏トラップ内の沈殿物除去と清掃。
- 技工用バキューム及び口腔外バキュームのフィルターとダスト清掃。

★大掃除時のお手入れメモ★

- ユニット清掃作業として、鉢洗い内のネットフィルター、バキュームフィルター、排水トラップフィルターの清掃、セパレータータンク付きのユニットであれば、タンク内の清掃、排水弁の清掃を行うことで、年始のバキュームと排水つまりのトラブル解消に有効です。また、年始のユニット稼働時はコップ給水の出水しと、タービン等のインスツルメントをはずしての出水しを行うことにより、タービン内の水つまりの防止につながります。
- 取り外したタービン等インスツルメントにつきましては、十分な注油・洗浄を行い、使用メーカーごとの指定された保管状態での保管・管理をお願いします。
- ユニットの水フィルター及びエアフィルターは汚れていませんか？汚れが目に見えて確認できる状態であれば交換をオススメします。定期的な交換により、タービン注水の目詰まり防止やエアへの水の混入を防ぎます。
- ユニットやシートの汚れとりに、専用のクリーナーがあります。専用のクリーナーをお使いいただきますとシートのヒビ割れを起こしにくくし、長持ちにもつながります。
- 石膏トラップのお手入れに“石膏沈殿物処理剤”があります。とっても手軽に石膏トラップ内の沈殿物を取り除くことができ、清掃も簡単に行えます。年始の悪臭防止につながりますので、石膏トラップの清掃は必ず行っていただきますようお願いいたします。また、悪臭防止にトラップ内の悪臭をとる抗菌・除菌防臭剤もあります。
- 自動現像器の年明けの始動に、現像・定着液の在庫を今一度ご確認いただけますようお願いいたします。
- 年始の始動時、診療開始前にはまず十分な水(コップ給水やインスツルメント類)を出していただくようお願いいたします。休みの間に使用していなかったために水垢が出る可能性があります。

以上、導入されておられます機器によって多少の違いはありますが、一年間フルに稼働した機器類を来年もよりよい状況でお使いいただくためにも、是非各項目の にチェックマークを入れてご確認いただけますようお願いいたします。お気付きの点や詳細につきましては、弊社アフターサービス課、または営業担当者までお気軽にお尋ね下さい。上記内容につきましてもご説明いたします。

◆◆◆編集後記◆◆◆

今年一年間、“UK レポート”のご愛読をいただき、誠にありがとうございました。記事内容につきましては、誤字・脱字等もあり大変ご迷惑をお掛けしたことをこの場をおかりしてお詫びいたします。来年も、変わらぬ“UK レポート”のご愛読の程、何卒よろしくお願いたします。

