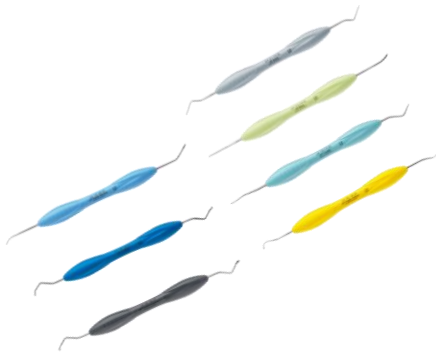


UK REPORT

New Products

LM マイクロサージカル
インスツルメント／白水貿易
＜歯周外科用インスツルメント＞

白水貿易から発売された“LM マイクロサージカルインスツルメント”は、低侵襲×高精度をカタチにした歯周外科用インスツルメントです。

【特徴】

- 切開範囲を最小限に抑えることで、患者さんへの侵襲を軽減し、高度な歯周外科治療を可能にします。
- 組織へのダメージを最小限にとどめることで術後の不快感抑え、快適な回復を促します。
- 血管網を温存する術式により、術後の組織回復を助け、良好な治癒環境を確保します。
- 精密な操作と組織保持により、機能面だけでなく審美面にも優れた治療結果を実現します。
- マイクロスコープやルーペの併用により、細部まで正確な処置が可能になります。

標準価格＝1 本 12,000 円～

クリアマージン
／ピーエスエーサクライ
＜歯肉圧排ペースト＞

ピーエスエーサクライから発売された“クリアマージン”は、手間なく簡単にシャープなマージン印象採得が可能な歯肉圧排ペーストです。

【特徴】

- 歯肉溝及び辺縁歯肉の滲出液や血液を抑制し、フィニッシュラインの印象採得が可能です。
- 患者様の苦痛低減・チェアタイムの短縮につながります。
- 適度な粘性があるので、形成した支台歯のマージンに盛り付ける操作が簡便に行えます。
- 充填から約 2 分後に洗い流すだけで印象の障害となる滲出液などを抑制します。
- 付属のアプリケーターチップは自由に角度調整が可能です。

標準価格＝1 箱 6,860 円

アルバデント クイックムース
／睦化学工業
＜口腔内装置洗浄剤＞

睦化学工業から発売された“アルバデントクイックムース”は、汚れも菌も簡単に落とす口腔内装置洗浄剤です。

【特徴】

- 酵素+過酸化水素+天然エキスのトリプルパワーでぬめり、臭い、菌を強力に取り除きます。
- 食後や外出先、訪問診療や介護先でも使用可能です。
- マウスピース、リテーナー、マウスガード等様々な口腔内装置に使用可能です。
- 泡タイプでグリーンアップルの香りです。
- ブラッシング不要で短時間で効果を発揮します。

患者参考価格＝1 本 (150ml)
990 円 (税込)

My Recommendation

『バトラー フローデンフォームN』
＜ サンスター ＞

標準価格＝1 本 (150ml) 2,500 円

口腔内に左右されない中性フッ化ナトリウム塗布材！

今回ご紹介させていただく商品は、サンスター㈱より発売されております『バトラー フローデンフォームN』です。

特徴として、中性のフッ化ナトリウム塗布材で補綴物や矯正装置を装着された患者さまにもお使いいただけます。また、フォーム（泡）タイプなのでトレイ法を用いた上顎・下顎の歯面塗布に適しており、歯面だけでなく歯間部、隣接面に入り込みやすく歯列全体に行き渡ります。お子様にもお使いいただきやすいグレープ味で高濃度フッ化物が配合されており、脱灰抑制、再石灰化促進に期待できます。

ご購入いただいた歯科医院様からは、「口腔内環境に左右されず使用することができるので便利。」「酸性のフッ素を使用できない場合に使用している。」とのお声をいただいております。商品の詳細につきましては、弊社営業担当者までお問合せいただけますようよろしくお願いいたします。


熊本店 営業二課 稲川 尚之

UK REPORT

The year-end Information

★年末・年始に向けてのご準備は万全ですか？

早いもので 2025 年も残りわずかとなりました。本レポートも今年最後になりますので、毎年恒例ではございますが、弊社アフターサービス課より年末に向けての“お手入れと点検”についてご紹介します。

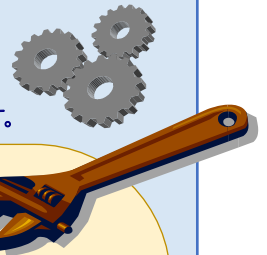

●診療室

①ユニット

- ☐ ユニットの水・エアーフィルターの有効期限確認。
- ☐ バキュームホース内の洗浄。(現在ご使用中の専用クリーナーを十分に吸引させてください)
- ☐ 鉢洗いの洗浄。(同上にて専用クリーナーにて十分に洗浄してください。及び、網力ゴやフィルターの洗浄も必要です)
- ☐ タービンやハンドピース等、各インスツルメント類の注油、及び洗浄。

②自動現像器

- ☐ タンククリーナー等を使用しタンク内の洗浄。
- ☐ ローラー部を中性洗剤で洗浄。
- ☐ ギア部を歯ブラシ等で洗浄。
※ローラー、ギアは水分を十分ふき取って下さい。
※現像・定着・水は来年の仕事始めに入れて下さい。

③電源

- ☐ 全ての診療機器を OFF 又はコンセントを抜く。
- ☐ 動力 (コンプレッサー、バキューム等) は、必ず OFF にしてください。

④給水

- ☐ 元栓を必ず締める。(特にテナントでご開業の医院様は忘れずに行ってください)

●機械室

①水抜きチェック

- ☐ コンプレッサー
※オートトラップ自動水抜き付きの場合は作動を確認して下さい。
※特に寒冷地の医院様は、冬場は適時に水抜きを行わないと、コンプレッサーや配管内部で水が凍結し、エアーが供給できなくなる可能性があります。また、使用しない年末年始間は、コンプレッサーに毛布を被せておくことも一つに手です。(始動時は必ず取り除いてください)
- ☐ トランスフォーマー (エアー減圧器)
- ☐ エアードライヤー

②V ベルトチェック (駆動しているゴムベルト)

- ☐ コンプレッサー
- ☐ バキュームモーター
※ベルトのたるみ、ヒビの割れの確認が必要です。

③オイルチェック

- ☐ コンプレッサー (オイルフリータイプの場合除く)
※スクロールタイプは駆動時間のチェック。

●その他

- ☐ 石膏トラップ内の沈殿物除去と清掃。
- ☐ 技工用バキューム及び口腔外バキュームのフィルターとダスト清掃。

★大掃除時のお手入れメモ★

- ユニット清掃作業として、鉢洗い内のネットフィルター、バキュームフィルター、排水トラップフィルターの清掃、セパレータータンク付きのユニットであれば、タンク内の清掃、排水弁の清掃を行うことで、年始のバキュームと排水つまりのトラブル解消に有効です。また、年始のユニット稼働時はコップ給水の出水しと、タービン等のインスツルメントをはずしての出水しを行うことにより、タービンの水つまりの防止につながります。
- 取り外したタービン等インスツルメントにつきましては、十分な注油・洗浄を行い、使用メーカーごとの指定された保管状態での保管・管理をお願いします。
- ユニットの水フィルター及びエアーフィルターは汚れていませんか？汚れが目に見えて確認できる状態であれば交換をオススメします。定期的な交換により、タービン注水の目詰まり防止やエアーへの水の混入を防ぎます。
- ユニットやシートの汚れとともに、専用のクリーナーがあります。専用のクリーナーをお使いいただきますとシートのヒビ割れを起こしにくく、長持ちにもつながります。
- 石膏トラップのお手入れに“石膏沈殿物処理剤”があります。とっても手軽に石膏トラップ内の沈殿物を取り除くことができ、清掃も簡単に行えます。年始の悪臭防止につながりますので、石膏トラップの清掃は必ず行っていただきますようお願いいたします。また、悪臭防止にトラップ内の悪臭をとる抗菌・除菌防臭剤もあります。
- 自動現像器の年明けの始動に、現像・定着液の在庫を今一度ご確認いただきますようお願いいたします。
- 年始の始動時、診療開始前には必ず十分な水 (コップ給水やインスツルメント類) を出していただくようお願いいたします。休みの間に使用していなかったために水垢が出る可能性があります。

以上、導入されておられます機器によって多少の違いはありますが、一年間フルに稼働した機器類を来年もよりよい状況でお使いいただくためにも、是非各項目の ☐ にチェックマークを入れてご確認いただきますようお願いいたします。お気付きの点や詳細につきましては、弊社アフターサービス課、または営業担当者までお気軽にお尋ね下さい。上記内容につきましてもご説明いたします。

◆◆◆編集後記◆◆◆

今年一年間、“UK レポート”のご愛読をいただき、誠にありがとうございました。記事内容につきましては、誤字・脱字等もあり大変ご迷惑をお掛けしたことをこの場をおかりしてお詫びいたします。来年も、変わらぬ“UK レポート”のご愛読の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

