

MANI! SPRING

Seasonal Campaign

2025

2/21

3/19



Topics! 新製品情報

JIZAI Pre020
キャンペーン 追加!

GPRキャンペーン 復帰!

MANI

株式会社モリタ



JIZAI Pre 020 キャンペーン追加！

好評のJIZAIシリーズに待望の Pre 020
キャンペーン追加しました！

■グライドパスキット



■シェイピングキット



《セット販売による特別価格！この機会にぜひお試しください!!》

JIZAI グライドパスキット

■標準価格 (3本入／1個)

~~5,400円~~ (税別)



JIZAI シェイピングキット

■標準価格 (3本入／1個)

~~5,400円~~ (税別)



キャンペーンセット価格

~~10,800円~~ (税別)

●各種単品でも特別価格でご提供いたします。

2025 SPRING
特別価格

医療機器認証番号：301ABBZX00035000

管理医療機器

一般名称：電動式歯科用ファイル

販売名：マニーNiTi ファイル

規 格	サイズ	テーバー	長 さ	入 数	標準価格	規 格	サイズ	テーバー	長 さ	入 数	標準価格		
グライドパスキット						単 品							
オリフィスオープナー	025	14	18mm	各1本入	5,400円	オリフィスオープナー	025	14	18mm	3 本入	5,400円		
Pre 013	013	04	21mm 25mm			Pre 013	013	04					
Pre 020	020	04				Pre 020	020	04					
						025 04	025	04					
						030 04	030	04	21mm 25mm				
						035 04	035	04					
						040 04	040	04					
						045 04	045	04					
						050 04	050	04					
						025 06	025	06					
						030 06	030	06					
						035 06	035	06					
シェイピングキット													
I	025	04	21mm 25mm	各1本入	5,400円								
II	025	06											
III	035	04											



Dファイnderとグライドファイnderを用いた石灰化根管・湾曲根管の穿通法 — 8-10 Technique —



石崎 秀隆 先生

さうち歯科医院 (静岡県)
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科歯周歯内治療学分野

1 背景

根管拡大は髄腔開拓後、根管の穿通・作業長測定の後に行うため、穿通できなければ根尖部までの拡大形成はできない。しかし日常臨床において、根管の石灰化による狭窄や湾曲などがしばしば穿通を阻み、満足のできる根管治療が行われているとは言い難い。日々の再治療の多さを鑑みても、まず初回治療の精度を上げることが重要であり、そのためには根管の穿通の精度を向上させる必要があると考えられる。

2 8-10 Technique

筆者は、初回根管治療の穿通を基本的に#08 Dファイnder (DF)と#10 グライドファイnder (GF)の2本の手用ファイルのみで行っており、このテクニックを8-10 Techniqueと呼んでいるが、これにより手付かずの初回治療の穿通はほぼ可能であると考えている。

このテクニックは、ドイツのEndodontistであるDr. Ralf Schlichtingの術式からヒントを得ている。DFは切削力が抑えられた穿通用のファイルとして、GFは刃を持った根管壁切削・穿通用ファイルとして開発されたものであり、8-10 Techniqueでは、#08 DFを根管のスカウトファイルとして、#10 GFを根管の拡大ファイルとして使用する。#10 DFで初めから穿通できればそのまま根管拡大へ移行するが、根管の途中までしか入らない場合は#08 DFを抵抗なく入るところまで入れた後に、同じ長さまで#10 GFを少しきりもみ状に動かしながら入れる。そうすることで、その長さ

で根管が少し拡大され、#08 DFがさらに少し先まで入りやすくなる。これを繰り返すことで8-10 Techniqueでは2本の手用ファイルのみで穿通を行う(図1、図2)。

注意点として#10 GFに切削片が付いていない場合は根管壁が切削されていないため、#08 DFが先に進まない可能性がある。また、#08 DFは回転操作ではなく押すようにして入るところまで入れる。カツカツした感覚で、細い根管に入るような粘着感がなければ、無理せずにファイルの先端に少しプレカーブなどを付与して入る方向を探す。#08 DFや#10 GFのファイルは非常に細く、無理に回転操作をすると破折の可能性もあるため、無理な回転操作は避ける。

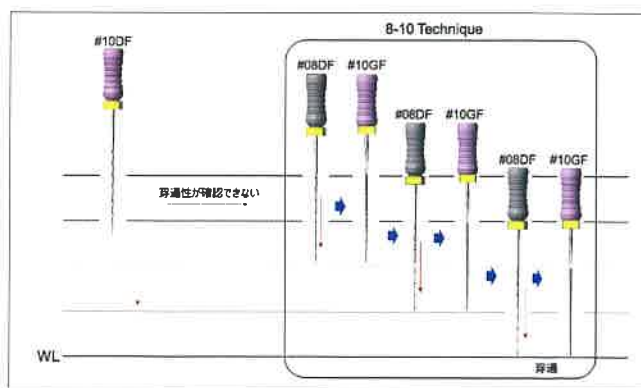


図1 8-10 Techniqueのシーケンス。
#10 DFで穿通できない場合、8-10 Techniqueを用いて穿通を行う。



図2 二重湾曲を持つ抜去歯を用いたトレーニング。

CLINICAL CASE REPORT vol.01

このテクニックは特別なファイル操作もなく、交互にファイルを根管に入れるだけであり、非常にシンプルであることが特徴として挙げられる。なお、筆者は8-10 Techniqueでそのまま穿通を行うことが大半だが、従来のストレートラインアクセスの重要性が変わらないことは強調しておきたい。

[注] 根管によっては#08 DFも入れづらいほど根管口が細いときがある。この場合、Coronal Pre-flaring*を行い、Coronal Pre-flaringには細いグライドパス用のJIZAI Pre 013を根管口から3～5mmほど入れる。これにより根管口が少し広がり、#08 DFが入りやすくなる。現在発売されているNiTiファイルに用意されているオリフィスオープナーは短くて先端径が太いものが多いため、根管口が狭窄している場合には不向きだと考えている。

* Coronal Pre-flaring……根管口を予備的に拡大すること

3 実際の臨床例

症例1

患歯は下顎左側第二大臼歯。近心根管は根管中部で細く湾曲していた。近心舌側根管は#08 DFが21mmで穿通したが、近心頬側根管は#08 DFが17mmまでしか入らなかったため、8-10 Technique (#08 DF 17mm → #10 GF 17mm → #08 DF 20mm → #10 GF 20mm → #08 DF 21mm穿通 → #10 GF 21mm)を用いて穿通を行った。すべての根管の穿通を確認後、根管の拡大形成・充填を行った(図3)。

症例2

患歯は上顎右側第二大臼歯。強い自発痛のため根管治療を行った。すべての根管は根管口から狭窄しており、特に近心根管は大きく湾曲していた。根管口を明示後、遠心頬側根管と口蓋根管は#08 DFで穿通(DB:20.5mm、P:21mm)できたが、近心頬側根管は大きく湾曲しており#08 DFが16mmまでしか入らなかったため、8-10 Technique(#08 DF 16mm → #10 GF 16mm → #08 DF 17mm → #10 GF 17mm → #08 DF 19mm → #10 GF 19mm → #08 DF 20mm穿通 → #10 GF 20mm)で穿通を行った。すべての根管の穿通を確認後、根管の拡大形成・充填を行った(図4)。



図3 症例1 下顎左側第二大臼歯



図4 症例2 上顎右側第二大臼歯
特に近心頬側根管は狭窄・湾曲している。

●Dファインダー

●グライドファインダー

●JIZAI Pre 013

医療機器届出番号:09B1X00006011050

一般医療機器

一般的名称:歯科用ファイル

販売名:マニーDファインダー

医療機器届出番号:09B1X00006011010

一般医療機器

一般的名称:歯科用ファイル

販売名:マニーKファイル

医療機器認証番号:301ABBZX00035000

管理医療機器

一般的名称:電動式歯科用ファイル

販売名:マニーNiTiファイル

穿通ファイル特集

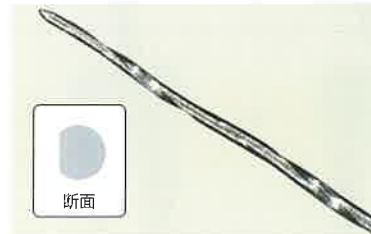
Your Endodontic Compass to find the right Path

— どんな症例でも迷わずに穿通、グライドパスができることを目指して —



Dファインダー

医療機器届出番号 09B1X00006011050
一般医療機器 一般名称：歯科用ファイル
販売名 マニーDファインダー



Exclusively designed for Patency 特徴的なD型断面

- 過剰な切削・食い込みを軽減できる。
- 刃部強度を高め、穿通力をUP。
- 石灰化、狭窄した根管にも折れにくく有効。

■ 標準価格 (6本入／1個 2,800円)
#8～15

~~5,600円~~ (税別)

**2025 SPRING
特別価格
2個以上!!**

グライドファインダー

医療機器届出番号 09B1X00006011010
一般医療機器 一般名称：歯科用ファイル
販売名 マニーKファイル



For Patency and Glide path 穿通性 + 切削性

- 先端部テーパを強化し力が伝わりやすい。
- 断面形状の変化による優れた切削性と柔軟性。
- 穿通のみならずグライドパス形成も可能。

■ 標準価格 (6本入／1個 2,200円)
#8～15

~~4,400円~~ (税別)

**2025 SPRING
特別価格
2個以上!!**



GPR

復活

ガッタパーチャを

より簡単に、

より早く、

より効率的に除去。




タイプ	先端径(mm)	
1S	0.70	
2S	0.50	
3N	0.40	
4N	0.30	

S=ステンレススチール N=ニッケルチタン

用途	組合せ(4通り)	
根管内の充填物を 除去するために用いる	1S → 3N	2S → 3N
	1S → 4N	2S → 4N
■最小包装単位: 4本入/ケース ■アソート(ASS): 1S(#70)、2S(#50)、3N(#40)、4N(#30) ■テーパー: 4/100 ■材質: ステンレススチール、ニッケルチタン		


STEP 1

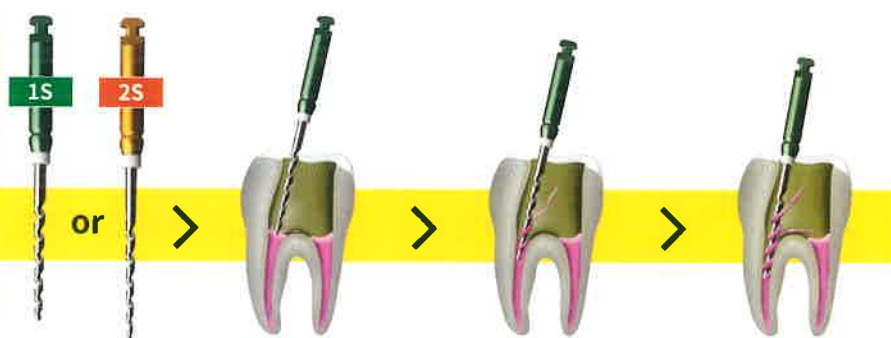根管口から根管中部までの除去




STEP 2

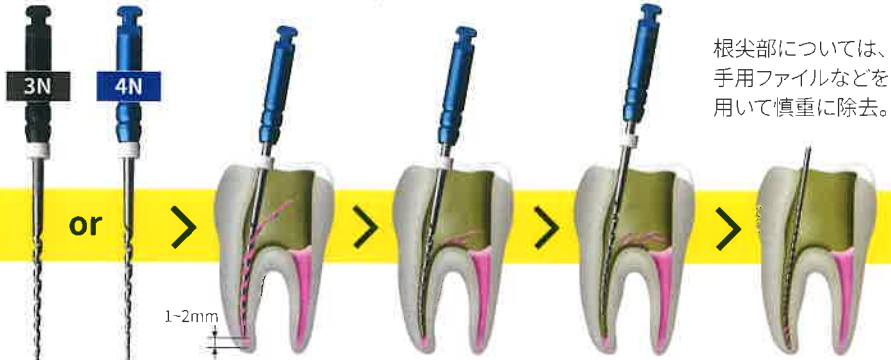根管中部から根尖1~2mm手前までの除去



根尖部については、
手用ファイルなどを
用いて慎重に除去。

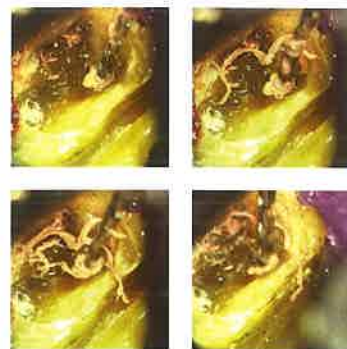症例



※(症例写真) 日本大学松戸歯学部
歯内療法学講座 臨床教授 辻本泰久先生

- 推奨回転数 1000~1500min⁻¹
- トルク設定 溶解剤・注水 不要

■標準価格(4本入/1個)
#1S、2S

~~2,350円~~ (税別)

2025 SPRING
特別価格

■標準価格(4本入/1個)
#3N、4N

~~4,650円~~ (税別)

2025 SPRING
特別価格

■標準価格(4本入/1個)
アソート(ASS)

~~3,500円~~ (税別)

2025 SPRING
特別価格

滅菌済針付縫合糸

完全復活!!

医療機器承認番号 20900BZZ00869000
高度管理医療機器 一般的名称: 滅菌済み絹製縫合糸
販売名 マニーシルク

医療機器承認番号 21100BZZ00049000
高度管理医療機器 一般的名称: ポリアミド縫合糸
販売名 マニーナイロン

医療機器承認番号 21100BZZ00050000
高度管理医療機器 一般的名称: ポリエステル縫合糸
販売名 マニーポリエステル

優れた切れ味。錆びにくく折れにくい、自社開発のマニーハードファイバーステンレススチールと、独自のレーザー微細加工技術でつくられています。



■標準価格 (12本入/1箱 5,000円)

#1~29

~~10,000円~~ (税別)

2025 SPRING
特別価格
2個以上!!

各種縫合手順を動画でご覧いただけます。

※PC・タブレット・スマートフォンでご覧ください。(movie.dental-plaza.com) ※QRコード読み取りアプリによっては動画サイト(ビデオライブラリー)のトップ画面にアクセスされることがあります。



全品番ラインナップ

注文番号	縫合針	縫合糸
売れ筋 No.2 1	逆三角 強弯 針長 18mm 針部径 0.43mm	4-0 シルク ブラックブレード 45cm (18")
2	逆三角 強弯 針長 25mm 針部径 0.73mm	3-0 シルク ブラックブレード 45cm (18")
売れ筋 No.1 3	逆三角 弱弯 針長 18mm 針部径 0.58mm	4-0 シルク ブラックブレード 45cm (18")
おすすめ 4	先端角 強弯 針長 18mm 針部径 0.38mm	5-0 ポリエステル ブラックブレード 45cm (18")
おすすめ 5	先端角 強弯 針長 18mm 針部径 0.53mm	3-0 シルク ブラックブレード 45cm (18")
6	丸 直 針長 20mm 針部径 0.58mm	4-0 シルク ブラックブレード 45cm (18")
7	逆三角 弱弯 針長 13mm 針部径 0.53mm	4-0 ナイロン ブラックブレード 45cm (18")
8	逆三角 弱弯 針長 18mm 針部径 0.58mm	4-0 ポリエステル ブラックブレード 45cm (18")
9	丸 強弯 針長 18mm 針部径 0.43mm	5-0 ポリエステル ブラックブレード 45cm (18")
10	丸 強弯 針長 18mm 針部径 0.53mm	3-0 シルク ブラックブレード 45cm (18")
11	丸 強弯 針長 16mm 針部径 0.73mm	2-0 シルク ブラックブレード 45cm (18")
12	丸 釣針 針長 16mm 針部径 0.53mm	4-0 ナイロン ブラックブレード 45cm (18")
13	丸 釣針 針長 16mm 針部径 0.63mm	3-0 ナイロン ブラックブレード 45cm (18")
14	丸 強弯 針長 13mm 針部径 0.53mm	4-0 シルク ブラックブレード 45cm (18")
15	丸 強弯 針長 16mm 針部径 0.53mm	4-0 ナイロン ブラックブレード 45cm (18")

注文番号	縫合針	縫合糸
16	丸 強弯 針長 20mm 針部径 0.63mm	3-0 ナイロン ブラックブレード 45cm (18")
17	丸 強弯 針長 20mm 針部径 0.58mm	4-0 シルク ブラックブレード 45cm (18")
18	逆三角 弱弯 針長 11mm 針部径 0.43mm	4-0 ナイロン ブラックモノフィラメント 45cm (18")
売れ筋 No.3 19	逆三角 弱弯 針長 13mm 針部径 0.38mm	5-0 ナイロン ブラックモノフィラメント 45cm (18")
20	逆三角 弱弯 針長 13mm 針部径 0.58mm	4-0 シルク ブラックブレード 45cm (18")
21	逆三角 強弯 針長 16mm 針部径 0.58mm	4-0 ナイロン ブラックモノフィラメント 45cm (18")
22	逆三角 強弯 針長 16mm 針部径 0.58mm	4-0 シルク ブラックブレード 45cm (18")
23	逆三角 弱弯 針長 18mm 針部径 0.58mm	4-0 ナイロン ブラックモノフィラメント 45cm (18")
24	逆三角 弱弯 針長 18mm 針部径 0.58mm	3-0 シルク ブラックブレード 45cm (18")
25	丸 弱弯 針長 13mm 針部径 0.43mm	4-0 シルク ブラックブレード 45cm (18")
26	丸 弱弯 針長 18mm 針部径 0.58mm	4-0 シルク ブラックブレード 45cm (18")
おすすめ 27	先端角 弱弯 針長 13mm 針部径 0.43mm	4-0 シルク ブラックブレード 45cm (18")
おすすめ 28	先端角 強弯 針長 16mm 針部径 0.48mm	4-0 シルク ブラックブレード 45cm (18")
おすすめ 29	先端角 弱弯 針長 18mm 針部径 0.53mm	4-0 シルク ブラックブレード 45cm (18")

※刃部先端のみに刃をつけることで切れ味を高め、組織の損傷を最小限に抑えています。



- 材料にマニー独自の精線加工を加え、粘り強さ、折れにくさ、硬度をUP!
- シャープなエッジにより切れ味を高く、表面を鏡面仕上げにすることで、切削片などの排出性も向上!
- ラバーストッパーの色と形により、長さと操作方法が容易に分かります。

■標準価格 (6本入/1個 1,750円)
#10~40

~~8,750円~~ (税別)

**2025 SPRING
特別価格
5個以上!!**

■標準価格 (6本入/1個 2,200円)
#06、08、45~80

~~6,600円~~ (税別)

**2025 SPRING
特別価格
3個以上!!**

RTファイル

医療機器届出番号 09B1X00006011010
一般医療機器 一般的名称: 歯科用ファイル
販売名: マニーRTファイル



- 柔軟性 驚きの柔軟性を実現! 直線根管はもちろんのこと、湾曲根管に威力を発揮。

- 切削力 RTファイルはマニーKファイルに比べ、約1.5倍の切削力。

- 折れにくさ ニッケルチタンファイルの柔軟性を理解しているが、いきなりの破折が怖いと感じている先生に必見です。柔軟性が高いことから伸びやすい面もありますが、ファイルのピッチが伸びることで交換の目安となります!

**人気
上昇中!**

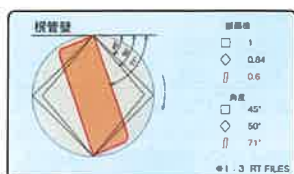


刃部拡大図


■標準価格 (6本入/1個 1,750円)
#15~40

~~5,250円~~ (税別)


**2025 SPRING
特別価格
3個以上!!**



断面図と刃のあたる角度

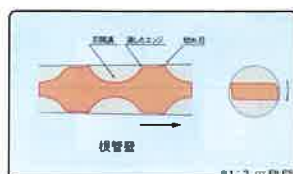

縦断面図及び横断面図

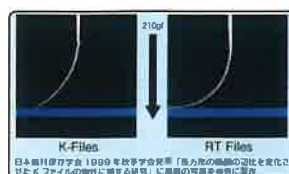

フレキシビリティ比較

Kファイル

医療機器届出番号 09B1X00006011010
一般医療機器 一般的名称：歯科用ファイル
販売名 マニーKファイル



■標準価格 (6本入／1個 1,750円)
#10～40

~~8,750円~~ (税別)

2025 SPRING
特別価格
5個以上!!

■標準価格 (6本入／1個 2,200円)
#06、08、45～80

~~6,600円~~ (税別)

2025 SPRING
特別価格
3個以上!!

Hファイル

医療機器届出番号 09B1X00006011020
一般医療機器 一般的名称：歯科用ファイル
販売名 マニーHファイル



■標準価格 (6本入／1個 1,750円)
#10～40

~~8,750円~~ (税別)

2025 SPRING
特別価格
5個以上!!

■標準価格 (6本入／1個 2,200円)
#08、45～80

~~6,600円~~ (税別)

2025 SPRING
特別価格
3個以上!!

角ブローチ

医療機器届出番号 09B1X00006009010
一般医療機器 一般的名称：歯科用ブローチ
販売名 マニー角ブローチ

鋭いエッジでワッテを巻きやすく！
鏡面仕上げによりワッテを根管内に
残留させやすく！ 操作性を向上！



■標準価格
(6ダース入／1個 4,300円)
#000～3

~~8,600円~~ (税別)

2025 SPRING
特別価格
2個以上!!

クレンザー

医療機器届出番号 09B1X00006009010
一般医療機器 一般的名称：歯科用クレンザー
販売名 マニークレンザー

均一な棘が精密な治療をサポート。



■標準価格
(6ダース入／1個 6,000円)
#000～3

~~12,000円~~ (税別)

2025 SPRING
特別価格
2個以上!!

ピーソリーマCA・ゲーツドリルCA



医療機器承認番号 22000BZX01630000
管理医療機器 一般の名称：歯科用根管口拡大ドリル
販売名 マニーピーソリーマ

■標準価格(6本入／1個 2,950円)

#1～5

~~8,850円~~ (税別)



**2025 SPRING
特別価格
3個以上!!**

根管口の拡大にはこれ！32mmに加え、28mmは小児や臼歯部の治療に！



医療機器承認番号 22000BZX01631000
管理医療機器 一般の名称：歯科用根管口拡大ドリル
販売名 マニーゲーツドリル

■標準価格(6本入／1個 2,950円)

#1～6

~~8,850円~~ (税別)



**2025 SPRING
特別価格
3個以上!!**



サージカルバーFG

医療機器届出番号 09B1X00006003010
一般医療機器 一般の名称：歯科用カーバイドバー
販売名 マニーカーバイドバー



“もう少しで届くのに” という歯痒い思いをなくします。

半チャックで使用していた悩みを解決！

ロングテーパーであるため視野の確保が可能。埋伏歯、メタルポスト、メタルコア、ファイバーコアなどの除去に効果を発揮！

※5倍速コントラを推奨します。



■標準価格
(4本入／1ケース 2,500円)
MZB+

~~5,000円~~ (税別)

**2025 SPRING
特別価格
2個以上!!**

■標準価格
(4本入／1ケース 2,000円)
#2、#330、#1557

~~4,000円~~ (税別)

**2025 SPRING
特別価格
2個以上!!**

11.00 25.00	11.00 28.00
# MZB+	# MZB+
199/015	199/015
SPECIAL SHAPE	

1.00 25.00	1.00 28.00
# 2	# 2
001/010	001/010
ROUND(PLAIN)	

2.00 25.00	2.00 28.00
# 330	# 330
232/008	232/008
PEAR(PLAIN)	

4.00 25.00	4.00 28.00
# 1557	# 1557
137/010	137/010
CYLINDER ROUND END(PLAIN)	

サージカルバー
形態表の見方
最高許容回転数
120,000min⁻¹
作業部長
全長
注文番号
形状/最大径
形状

除去用
バー特集

折れない工夫、切れる設計! タッチ感に変化。

除去効率を求めてM330がM330Pにパワーアップ!



※写真の商品は I クラス【45形態】



パワー
アップ!

ご使用のポイント

- ①フェザータッチで十分な切削感が得られます。
- ②十分な注水により製品性能を最大限に発揮し

■標準価格

(10本入/1シート 1,800円)
M330P、M330、M1557、M1558
I クラス
【3形態/M330P、M330、M1557、M1558】

~~9,000円~~ (税別)

2025 SPRING
特別価格
5個以上!!

■標準価格

(10本入/1シート 2,350円)
M1931、M1957、M1958、M1970
II クラス (リムーバルバー)
【4形態/M1931、M1957、M1958、M1970】

~~11,750円~~ (税別)

2025 SPRING
特別価格
5個以上!!

■標準価格

(10本入/1シート)
MM16DB、MM14CF、MM21DC、MM23DC、MM15EZ、MM15ZB
III クラス (リムーバルバー)
【6形態/MM16DB、MM14CF、MM21DC、MM23DC、MM15EZ、MM15ZB】

~~9,200円~~ (税別)

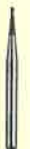
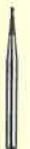
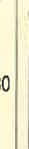
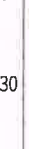
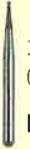
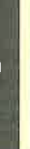
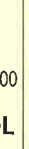
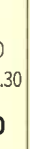
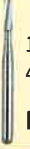
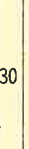
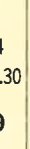
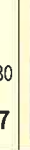
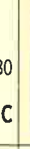
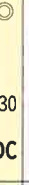
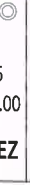
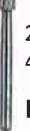
2025 SPRING
特別価格
5個以上!!

形態表の見方

最高許容回転数
010/005
形状/最大径
0.50/19.30
作業長/全長
M1/4
注文番号

最小包装単位
○ I クラス
10本入り/シート
△ II クラス
10本入り/シート
◎ III クラス
10本入り/シート

30万回転 300,000min⁻¹
20万回転 200,000min⁻¹
15万回転 150,000min⁻¹


 ROUND (PLAIN)	 010/005 0.50/19.30 M1/4	 001/006 0.60/19.30 M1/2	 001/008 0.80/19.30 M1	 001/010 1.00/19.30 M2	 001/012 1.20/19.30 M3	 001/014 1.40/19.30 M4	 001/016 1.60/19.30 M5	 001/018 1.80/19.30 M6	 001/021 2.10/19.30 M7	 001/023 2.30/19.30 M8	INVERTED CONE (PLAIN)
 110/006 0.70/19.30 M33 1/2	 010/008 0.80/19.30 M34	 010/010 1.10/19.30 M35	 010/012 1.20/19.30 M36	 010/014 1.40/19.30 M37	CYLINDER FLAT END (PLAIN)	 107/010 4.00/19.30 M57	 107/012 4.00/19.30 M58	TAPER FLAT END (PLAIN)	 171/009 5.00/21.00 M169L	 168/010 4.00/19.30 M170	 168/012 4.00/19.30 M171
 168/016 4.00/19.30 M172	PEAR (PLAIN)	 237/008 3.00/19.30 M245	 完全形 No.2 232/008 2.00/19.30 M330P	 完全形 No.3 232/008 2.00/19.30 M330	 232/010 2.00/19.30 M331	 232/012 2.00/19.30 M332	CYLINDER FLAT END (CROSSCUT)	 107/010 4.00/19.30 M557	 107/012 4.00/19.30 M558	 107/014 4.00/19.30 M559	 107/016 4.00/19.30 M560
TAPER FLAT END (CROSSCUT)	 168/009 4.00/19.30 M699	 168/010 4.00/19.30 M700	 168/012 4.00/19.30 M701	 171/012 7.00/21.00 M701L	 168/016 4.00/19.30 M702	 168/021 4.70/19.30 M703	CYLINDER ROUND END (PLAIN)	 137/010 4.00/19.30 M1157	 137/012 4.00/19.30 M1158	 137/014 4.00/19.30 M1159	CYLINDER ROUND END (CROSSCUT)
 完全形 No.1 137/010 4.00/19.30 M1557	 完全形 No.4 137/012 4.00/19.30 M1558	 137/014 4.00/19.30 M1559	SPECIAL SHAPE	 196/016 5.50/21.00 MM16DB	 164/014 6.00/21.00 MM14CF	 166/014 8.90/23.40 MCE4CF	 168/012 4.00/19.30 M701X	 137/010 4.00/19.30 MM21DC	 168/012 4.00/19.30 MM23DC	 GOOD オススメ 198/015 9.00/21.00 MM15EZ	 GOOD オススメ 199/015 11.00/23.00 MM15ZB
FINISHING (PLAIN)	 277/023 4.00/20.00 M7408	 469/009 4.00/19.30 M7901	 496/010 4.00/19.30 M7902	 496/012 4.00/19.30 M7903	REMOVAL (CROSSCUT)	 237/010 2.00/19.00 M1931	 137/010 4.00/19.00 M1957	 完全形 No.5 137/012 4.00/19.00 M1958	 194/010 4.00/19.00 M1970		

ダイヤモンドFGブリストパック


- ▶治療時間の**短縮**に!
- ▶**カーバイドバー**の代わりとしても有効!
- ▶**ジルコニア**の除去に効果的!

Super Coarse	ISO 039/034 5.1/19.2 EX-11SC	ISO 237/023 5.3/19.1 EX-21SC	ISO 237/034 5.1/19.1 EX-26SC	ISO 257/034 5.2/19.2 FO-27SC	ISO 141/014 8.3/22.3 SR-11SC
	ISO 166/018 10.3/22.1 TC-11SC	ISO 173/018 10.3/21.9 TF-12SC	ISO 170/023 5.6/19.1 TF-22SC	ISO 170/018 4.3/19.1 TF-31SC	ISO 197/018 7.3/21.2 TR-21SC
	ISO 198/020 9.3/21.9 TR-13SC				

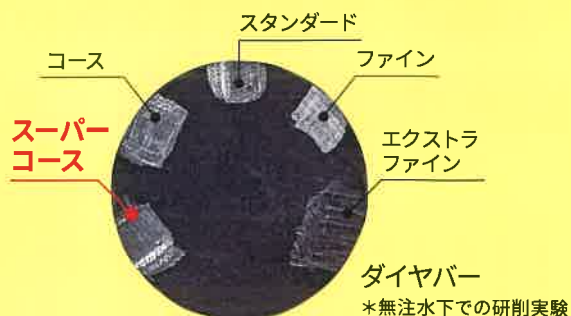チタンブロック研削検証



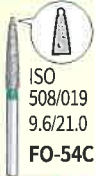チタンクラウンの保険適用がスタートし、除去に関するお問い合わせを多数いただいております。ダイヤモンド共に十分切削が可能であることが確認されました!

Coarse	 ISO 508/019 9.6/21.0 FO-54C	 ISO 166/017 10.1/22.0 TC-11C	 ISO 173/019 10.2/21.8 TF-13C	 ISO 198/019 9.2/21.8 TR-13C	 ISO 197/018 7.2/20.0 TR-62C	 ISO 072/043 2.0/19.2 WR-13C	Standard	 ISO 002/018 2.4/19.1 BC-31	 ISO 002/016 3.6/19.1 BC-32	 ISO 002/014 2.5/19.1 BC-42	 ISO 002/012 2.6/19.1 BC-43	 ISO 001/018 1.6/19.1 BR-31	
	 ISO 001/014 1.3/19.1 BR-41	 ISO 001/010 0.9/19.1 BR-45	 ISO 001/012 1.1/19.1 BR-46	 ISO 001/008 0.7/19.0 BR-49	 ISO 032/011 2.4/19.1 DI-41	 ISO 032/014 3.3/19.1 DI-42		 ISO 039/032 5.0/19.1 EX-11	 ISO 039/035 7.2/20.1 EX-12	 ISO 553/019 10.4/23.2 EX-17	 ISO 237/018 5.2/19.1 EX-20	 ISO 237/021 5.2/19.0 EX-21	 ISO 190/017 10.1/24.0 EX-24
★	 ISO 545/018 7.2/21.2 EX-29	 ISO 237/014 4.3/19.1 EX-31	★  ISO 544/019 4.4/19.2 EX-38	 ISO 237/011 3.1/19.1 EX-41	 ISO 299/014 10.2/24.1 FO-11	 ISO 297/014 7.2/21.1 FO-21	 ISO 288/016 7.2/21.1 FO-22	 ISO 257/028 5.0/19.1 FO-25	 ISO 257/032 5.0/19.1 FO-27	 ISO 257/018 3.9/19.7 FO-32	 ISO 111/012 8.2/22.1 SF-11	 ISO 111/014 8.2/22.0 SF-12	 ISO 111/016 8.2/22.1 SF-13
 ISO 110/014 7.2/21.0 SF-21	 ISO 109/013 4.7/19.1 SF-31	 ISO 109/011 4.3/19.0 SF-41	 ISO 010/013 1.4/19.0 SI-46	 ISO 010/015 1.8/19.0 SI-47	 ISO 010/017 1.9/19.0 SI-48	 ISO 297/012 6.2/21.0 SO-20	 ISO 298/014 8.2/21.8 SO-21	 ISO 141/012 8.2/22.2 SR-11	 ISO 141/014 8.2/22.2 SR-12	 ISO 141/016 8.2/22.2 SR-13	 ISO 160/016 10.2/22.2 TC-11	 ISO 166/018 10.4/23.2 TC-16	
 ISO 165/014 8.2/22.0 TC-21	 ISO 164/011 6.1/21.2 TC-26	 ISO 173/014 10.2/24.0 TF-11	 ISO 173/016 10.2/21.8 TF-12	 ISO 173/018 10.2/21.8 TF-13	 ISO 172/023 9.3/21.8 TF-14	 ISO 171/014 7.2/21.0 TF-20	 ISO 171/016 7.2/21.0 TF-21	 ISO 170/021 5.5/19.0 TF-22	 ISO 170/018 5.2/20.1 TF-23	 ISO 170/016 4.2/19.0 TF-31	 ISO 169/011 3.7/19.1 TF-41	 ISO 170/012 4.2/19.0 TF-42	
 ISO 170/014 4.2/19.0 TF-43	 ISO 199/016 10.2/21.8 TR-11	 ISO 199/016 10.2/21.8 TR-12	 ISO 198/018 9.2/21.8 TR-13	 ISO 198/022 9.3/22.0 TR-14	 ISO 199/022 11.4/23.8 TR-15	 ISO 199/023 11.4/23.8 TR-19	 ISO 197/014 7.2/21.0 TR-20	 ISO 197/016 7.2/21.1 TR-21	 ISO 197/018 7.2/21.2 TR-24	 ISO 199/016 10.2/21.7 TR-25	 ISO 198/018 9.2/21.8 TR-26	 ISO 041/024 0.6/19.2 WF-30	
 ISO 072/042 1.9/19.1 WR-13	Short Shank		 ISO 002/014 2.5/16.7 BC-S42	 ISO 002/012 2.6/16.7 BC-S43	 ISO 001/010 0.9/16.7 BR-S45	 ISO 001/012 1.1/16.7 BR-S46	 ISO 032/011 2.4/17.2 DI-S41	 ISO 297/014 7.2/18.2 FO-S21	 ISO 508/019 9.6/20.0 FO-S54	 ISO 001/008 1.0/17.1 MI-S45	 ISO 277/024 4.8/17.1 Pro-S3	 ISO 109/011 3.8/16.7 SF-S41	 ISO 010/013 1.4/16.6 SI-S46



■標準価格(5本入/1シート4,500円)
 スーパーコース

~~13,500円~~ (税別)

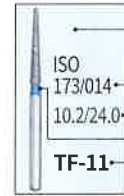
**2025 SPRING
 特別価格**
 3個以上!!

■標準価格(5本入/1シート3,300円)
 コース、スタンダード、ファイン、エクストラファイン

~~9,900円~~ (税別)

**2025 SPRING
 特別価格**
 3個以上!!

ダイヤモンド
 形態表の見方



許容回転数(背景色)
45万回転 450,000min ⁻¹
30万回転 300,000min ⁻¹
16万回転 160,000min ⁻¹
9万回転 90,000min ⁻¹

ISO/最大径
 作業長/全長
 カラーコード
 注文番号

ISO 010/017 1.9/16.6 SI-S48	ISO 297/012 6.2/18.8 SO-S20	ISO 165/014 8.2/20.0 TC-S21	ISO 173/016 10.3/21.2 TF-S12	ISO 171/014 7.2/18.8 TF-S20	ISO 171/016 7.2/18.8 TF-S21	ISO 170/021 5.5/16.9 TF-S22	ISO 170/018 5.2/17.1 TF-S23	ISO 170/016 4.2/16.8 TF-S31	ISO 169/011 3.7/16.8 TF-S41	ISO 299/018 9.6/20.9 TR-S13	ISO 198/022 9.3/20.1 TR-S14	ISO 197/016 7.2/18.8 TR-S21
Super Short Shank	ISO 138/009 2.3/16.1 CD-SS51	ISO 032/011 2.4/14.5 DI-SS41	ISO 297/014 6.1/16.1 EX-SS13	ISO 197/015 6.1/16.1 EX-SS14	ISO 544/016 4.2/14.3 EX-SS33	ISO 544/019 4.5/16.1 EX-SS38	ISO 165/014 8.2/17.1 TC-SS21	ISO 170/016 4.2/14.3 TF-SS31	ISO 197/016 7.2/17.7 TR-SS21	Fine	ISO 001/006 0.5/19.0 BR-48F	ISO 001/006 0.6/16.7 CD-50F
ISO 138/007 2.2/16.7 CD-51F	ISO 139/007 3.8/16.7 CD-52F	ISO 539/007 2.2/16.7 CD-53F	ISO 295/007 2.2/16.7 CD-54F	ISO 277/008 1.2/16.7 CD-55F	ISO 295/007 2.2/16.7 CD-56F	ISO 295/007 3.6/16.7 CD-57F	ISO 156/009 3.2/16.2 CD-58F	ISO 197/013 6.9/16.7 CD-59F	ISO 138/007 2.2/19.0 CD-60F	ISO 139/007 3.8/19.0 CD-61F	ISO 156/009 3.2/19.0 CD-62F	ISO 546/021 9.1/21.7 CE-12F
ISO 544/020 5.3/18.9 CE-13F	ISO 254/027 4.8/20.6 CE-15F	ISO 198/017 9.1/21.7 CE-16F	ISO 546/011 8.1/21.9 CE-17F	ISO 196/020 5.1/19.0 CR-11F	ISO 196/015 4.1/19.0 CR-12F	ISO 197/012 7.1/21.5 CR-21F	ISO 298/013 8.1/21.5 CR-22F	ISO 179/010 9.2/21.0 EX-18F		ISO 237/020 5.1/18.9 EX-21F	ISO 237/013 4.2/19.0 EX-31F	ISO 297/013 7.1/21.0 FO-21F
ISO 288/015 7.1/21.0 FO-22F	ISO 257/015 3.2/19.0 FO-30F	ISO 198/020 8.1/22.1 Pro-1f	ISO 198/017 8.2/22.1 Pro-2f	ISO 277/022 4.7/20.6 Pro-3f	ISO 237/019 5.1/19.1 Pro-4f	ISO 041/039 0.7/19.1 Pro-5f	ISO 166/015 10.1/21.9 TC-11F	ISO 165/013 8.1/21.9 TC-21F	ISO 173/015 10.1/21.7 TF-12F	ISO 171/015 7.1/20.9 TF-21F	ISO 199/015 10.1/21.7 TR-11F	ISO 198/017 9.1/21.7 TR-13F
ISO 197/015 7.1/21.0 TR-21F	ISO 199/015 10.1/21.6 TR-25F	ISO 198/017 9.1/21.7 TR-26F	ISO 072/015 0.6/19.1 WR-31F	Short Shank	ISO 072/015 0.6/16.6 WR-S31F	Super Short Shank	ISO 298/013 7.7/18.1 FO-SS21F	ISO 165/012 8.2/18.1 TC-SS21F	Extra Fine	ISO 001/015 1.4/18.9 BR-40EF	ISO 546/019 8.9/21.6 CE-12EF	ISO 544/019 5.1/18.8 CE-13EF
ISO 254/025 4.6/20.5 CE-15EF	ISO 198/015 8.9/21.6 CE-16EF	ISO 196/019 4.9/18.9 CR-11EF	ISO 196/013 3.9/18.9 CR-12EF	ISO 237/018 4.9/18.8 EX-21EF	ISO 218/012 7.0/21.0 EX-27EF	ISO 545/018 6.9/21.0 EX-29EF	ISO 138/015 3.3/19.0 EX-36EF	ISO 254/023 1.9/19.0 EX-37EF	ISO 544/018 4.2/18.9 EX-38EF	ISO 257/012 6.0/19.9 FO-20EF	ISO 297/011 6.9/20.9 FO-21EF	ISO 288/013 6.9/20.9 FO-22EF
ISO 257/014 3.1/18.9 FO-30EF	ISO 540/009 4.2/23.4 FO-40EF	ISO 297/009 5.9/18.4 FO-41EF	ISO 289/010 7.6/21.9 FO-42EF	ISO 198/021 8.8/22.0 Pro-1EF	ISO 198/018 7.9/18.9 Pro-2EF	ISO 166/013 9.9/21.8 TC-11EF	ISO 165/011 7.9/21.8 TC-21EF	ISO 173/013 9.9/21.6 TF-12EF	ISO 171/013 6.9/20.8 TF-21EF	ISO 199/013 9.9/21.6 TR-11EF	ISO 198/015 8.9/21.6 TR-13EF	ISO 197/013 6.9/20.9 TR-21EF
ISO 199/013 9.9/21.5 TR-25EF	ISO 198/015 8.9/21.6 TR-26EF	Short Shank	ISO 198/019 8.9/19.9 TR-S14EF	Super Short Shank	ISO 297/012 5.9/15.9 EX-SS13EF	ISO 197/012 5.9/15.9 EX-SS14EF	ISO 544/015 4.0/14.2 EX-SS33EF	ISO 544/018 4.2/15.9 EX-SS38EF	スーパーコース(SC)/180-212μm			
									コース(C) /125-150μm			
									スタンダード(S) /106-125μm			
									ファイン(F) /53-63μm			
									エクストラファイン(FF) /20-30μm			

錆びに強く、オートクレーブ可能



医療機器届出番号 09B1X00006001010
一般医療機器 一般的名称: 歯科用スチールバー
販売名 マニーステンレスバー

MI重視

- MI(ミニマルインターベーション)
- 軟化象牙質を選択的に除去

	全長	最高許容回転数
	22mm	1,200min ⁻¹
	28mm	1,200min ⁻¹
	34mm	800min ⁻¹

※34mmは、#2と#6のみ

- 最小包装単位: 6本入/ケース
- 規格: 22、28mm: 1/2、1、2、3、4、5、6、7、8
: 34mm: 2、6

■標準価格
(6本入/1ケース 2,700円)

~~8,100円~~ (税別)

**2025 SPRING
特別価格
3個以上!!**

医療機器届出番号 09B1X00006001020
一般医療機器 一般的名称: 歯科用スチールバー
販売名 マニーステンレスバーハード

切削性重視

- 切削性持続!
- 切れ味良好!



	全長	最高許容回転数
	22mm	4,000min ⁻¹
	28mm	4,000min ⁻¹

- 最小包装単位: 6本入/ケース
- 規格: 1/2、1、2、3、4、5、6、7、8
■アソート: 1~6

■標準価格
(6本入/1ケース 2,700円)

~~8,100円~~ (税別)

**2025 SPRING
特別価格
3個以上!!**

サイズ	刃部最大径
1/2	0.6mm
1	0.8mm
2	1.0mm
3	1.2mm
4	1.4mm
5	1.6mm
6	1.8mm
7	2.1mm
8	2.3mm

ご注文方法のご注意

○個以上!!

と、記載のある商品は、
その個数以上でご注文ください。

※表記の個数以上による販売になります。

※ **○個以上!!** の記載がない商品は、
1個からご注文いただけます。

リーマ



- 材料にマニ独自の精練加工を加え、粘り強さ、折れにくさ、硬度をUP!
- シャープなエッジにより切れ味を高く、表面を鏡面仕上げにすることで、切削片などの排出性も向上!
- ラバーストッパーの色と形により、長さと操作方法が容易に分かります。

■標準価格
(6本入/1ケース 1,750円)
#10~#40

~~8,750円~~ (税別)

■標準価格
(6本入/1ケース 2,000円)
#45、#50、#60

~~6,600円~~ (税別)

個数にご注意ください。

リーマ

コードNo.239040~043					
No.	長さ	21mm	25mm	28mm	31mm
10					
15			1	1	
20			1	1	
25			1	1	
30			1	1	
35			1	1	
40					
[5~40](7~1)					
合 計			5	5	

※5個以上からのご注文となります。

※3個以上からのご注文となります。

MEMO

製造販売 **マニ株式会社**

〒321-3231 栃木県宇都宮市清原工業団地8番3

【国内営業G】 Tel:028-667-8591/Fax:028-667-8593 URL:http://www.mani.co.jp

発売 **株式会社モリタ**

大阪本社 ■〒564-8650
東京本社 ■〒110-8513

大阪府吹田市垂水町3丁目33番18号 Tel:06-6380-2525
東京都台東区上野2丁目11番15号 Tel:03-3834-6161

マニースプリングキャンペーン

ご注文書 ①

JIZAI キャンペーンセット			
コードNo.202490377、378			
No.	長さ	21mm	25mm
セット			
合計			

JIZAI キット			
コードNo.202490384		コードNo.202490369	
No.	長さ	21mm	25mm
グライドバス キット			
合計			

Dファインダー			
コードNo.202390410、411			
No.	長さ	21mm	25mm
08			
10			
12			
15			
合計			

JIZAI								
コードNo.202490370～376、382、383								
No.	長さ	18mm	21mm	25mm	No.	長さ	21mm	25mm
オリフィスオープナー 25(.14)					40(.04)			
Pre 013(.04)					45(.04)			
Pre 020(.04)					50(.04)			
25(.04)					25(.06)			
30(.04)					30(.06)			
35(.04)					35(.06)			
合 計					合 計			

滅菌済針付縫合糸	
コードNo.202390160	
番号	個数
合計	

グライドファインダー			
コードNo.202490380、381			
No.	長さ	21mm	25mm
08			
10			
12			
15			
合計			

MIステンレスバーCA				
コードNo.202490696～698				
No.	長さ	22mm	28mm	34mm
1/2				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
1～6 (アソート)				
合 計				

ステンレスバーハードCA			
コードNo.202490689、202490699			
No.	長さ	22mm	28mm
1/2			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
1～6 (アソート)			
合計			

Kファイル											
コードNo.202390052～055						コードNo.202390056～059					
No.	長さ	21mm	25mm	28mm	31mm	No.	長さ	21mm	25mm	28mm	31mm
10						06					
15						08					
20						45					
25						50					
30						55					
35						60					
40						70					
15～40 (アソート)						80					
合 計						45～80 (アソート)					
※5個以上からのご注文となります。						合 計					

リーマ											
コードNo.202390040～043					コードNo.202390044～047						
No.	長さ	21mm	25mm	28mm	31mm	No.	長さ	21mm	25mm	28mm	31mm
10						06					
15						08					
20						45					
25						50					
30						55					
35						60					
40						70					
15～40 (アソート)						80					
合 計						45～80 (アソート)					
※5個以上からのご注文となります。						合 計					

RTファイル					
コードNo.202390400、401、404、405					
No.	長さ	21mm	25mm	28mm	31mm
15					
20					
25					
30					
35					
40					
15～40 (アソート)					
合 計					

A ※3個以上からのご注文となります。 ※3個以上からのご注文となります。 ※3個以上からのご注文となります。

ご注文 2025年 月 日 キャンペーン期間 2025年2月21日(金)→3月19日(水)

お名前	貴医院名
ご住所 〒	
TEL ()	
お出入りの歯科商店名	

マニー スプリングキャンペーン

ご注文書 ②

Mカーバイドバー+FG									
				〈Iクラス〉コードNo.202490406		〈IIクラス〉コードNo.202490407		〈IIIクラス〉コードNo.202490408	
形態番号	個 数	形態番号	個 数	形態番号	個 数	形態番号	個 数	形態番号	個 数
M1/4		M34		M330P		M701L		M7408	
M1/2		M35		M330		M702		M7901	
M1		M36		M331		M703		M7902	
M2		M37		M332		M1157		M7903	
M3		M57		M557		M1158		M1931	
M4		M58		M558		M1159		M1957	
M5		M169L		M559		M1557		M1958	
M6		M170		M560		M1558		M1970	
M7		M171		M699		M1559		合 計	
M8		M172		M700				合 計	
M33 1/2		M245		M701					
合 計		合 計		合 計		合 計			

※5個以上からのご注文となります。

Hファイル											
コードNo.202390064～067					コードNo.202390068～071						
No.	長さ	21mm	25mm	28mm	31mm	No.	長さ	21mm	25mm	28mm	31mm
10						08					
15						45					
20						50					
25						55					
30						60					
35						70					
40						80					
15～40 (アソート)						45～80 (アソート)					
合 計						合 計					

※5個以上からのご注文となります。

※3個以上からのご注文となります。

ピースリマCA				
コードNo.202390460～462				
No.	長さ	28mm	32mm	38mm
1				
2				
3				
4				
5				
合計				

※3個以上からのご注文となります。

ゲーツドリルCA				
コードNo.202390143～145				
No.	長さ	28mm	32mm	38mm
1				
2				
3				
4				
5				
6				
1～6 (アソート)				
合計				

※3個以上からのご注文となります。

サージカルバーFG		
コードNo.202490390～393		
No.	長さ	
MZB ⁺	25mm	28mm
2		
330		
1557		
合 計		

※2個以上からのご注文となります。

ダイヤバーFGブリストパック			
コードNo.202490639～659、662、685			
形態番号	個 数	形態番号	個 数
合 計		合 計	

※3個以上からのご注文となります。

角ブローチ	
コードNo.202390167	
No.	個 数
000	
00	
0	
1	
2	
3	
合 計	

※2個以上からのご注文となります。

クレンザー	
コードNo.202390165	
No.	個 数
000	
00	
0	
1	
2	
3	
合 計	

※2個以上からのご注文となります。

A

ご注文 2025年 月 日 キャンペーン期間 2025年2月21日(金)→3月19日(水)

お名前	貴医院名
ご住所 〒	
TEL ()	
お出入りの歯科商店名	

JIZAIキャンペーンセット、JIZAIキット、JIZAI、JIZAI Pre 013、JIZAI Pre 020、GPR、Mカーバイドバー+FG(IIIクラス)以外のご注文は、セット単位にてお願いいたします。

- 本注文書に必要事項をご記入の上、お出入りの歯科商店にお渡しください。
- 掲載商品の標準価格は2025年2月現在のものです。標準価格には消費税等は含まれません。
- 数量に限りがありますので、期間中でもセールを打ち切らせていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
- お問い合わせはお出入りの歯科商店までお願いします。
- 掲載されているコードNo.は発売元(株)モリタのコードNo.です。
- 特別セールにつき、お買い上げ後の返品・交換はいたしかねますので、ご注意ください。
- 勝手ながらRTファイルの#45～80、リマ・K・Hファイルの#90～140、18mmリマ・ファイルは対象外とさせていただきます。
- 商品の詳細パンフレットのご入用の方は、お出入りの歯科商店にご依頼ください。