

STATIM G4

カセット式卓上型高速高圧蒸気滅菌器



口腔内スキャナーチップ、排唾管、ハンドピースも 滅菌が可能なクラスS滅菌器

カセット式高速高圧蒸気滅菌器



①高速滅菌で、器具在庫の効率化！

Statim 2000G4 は、滅菌フェーズ後、システム内の余熱を利用して対流熱で乾燥させます。熱はカセット中へと放出され、未包装滅菌時間はわずか6分です。乾燥を含む包装滅菌は35分で完了できます。

Statim 5000G4 は、滅菌サイクルで発生する熱を、滅菌チャンバ内に位置するユニークな乾燥プレートによって「吸収」し、その熱が直接器具へ放出され、最大負荷乾燥にかかる時間は、未包装滅菌でわずか9分です。乾燥を含む包装滅菌は40分で完了できます。



②Web コミュニケーションが可能！

Statim G4 シリーズは、WIFIもしくは有線LANにてWeb接続する事で無料クラウドベースMy.Coltene.comアカウントを使用できます。滅菌カレンダーやメール通知設定により、日常の滅菌状況、定期メンテナンスやアフターサービスを簡単に管理できます。よりスムーズな保守サービスが可能となり、快適な機器管理を提供できます。



④カラー液晶のタッチパネルで操作簡単！

各種アイコン表示の為、わかりやすくナビゲーションされます。また、一目で各項目のステータス（例：滅菌カセットが正しく挿入されているか等）も表示されます。



⑤十分な滅菌容量！

StatimG4 は滅菌時間が短いだけでなく、多忙な医院でのニーズを満たすのに十分な容量も備えています。Statim 2000G4 は最大5パウチ分、Statim 5000G4 は最大12パウチ分の容量を兼ね備えております。



⑥ランニングコストダウン簡易セルフメンテナンス

パッキンやフィルター交換する際、従来の滅菌器は本体を開けなければならなかった構成でしたが、ステイティムなら全て医院様内で交換可能です。



③中空器具も滅菌可能な器具に優しい滅菌技術

淡水機能により、サイクル毎にきれいな水を使用致します。独自の陽圧パルス脱気式 (PPPD) により、強制的に高圧蒸気の注入を繰り返すことによりカセット内部の残存空気を確実に排出させ、効率的に素早く、中実の器具はもちろんの事、中空器具もしっかりと滅菌致します。

 **COLTENE**

STATIM 2000 G4 製品番号：G4-151002

ユニットサイズ (L x W x H)：49.5cm x 41.5cm x 15cm

カセット内部寸法：28cm x 18cm x 3.5cm

水なしの重量：22kg

消費電力：100V、50/60Hz、12A

未包装サイクル

包装サイクル

ゴム / プラスチック

滅菌時間	3.5 分	3.5 分	15 分
滅菌温度	134℃	134℃	121℃
標準価格	968,000円(税別)		

STATIM 5000 G4 製品番号：G4-221005

ユニットサイズ (L x W x H):60cm x 41cm x 19cm

カセット内部寸法：38cm x 18cm x 7.5cm

水なしの重量：34kg

消費電力：100V、50/60Hz、12A

未包装サイクル

包装サイクル

ゴム / プラスチック

滅菌時間	3.5 分	3.5 分	15 分
滅菌温度	134℃	134℃	121℃
標準価格	1,570,000円(税別)		

付属品



付属品



別売り



STAT-DRI PLUS (スタットドライプラス)

乾燥剤 STAT-DRI PLUS でカセット内表面をコーティングする事で、水滴の気化を促進し、乾燥効果を高めます。

製品番号

2OZPLUS STAT-DRI Plus 2オンス スプレーボトル

P.C.D.中空器具滅菌効果テスター + 試験紙

P.C.D.テスターで排唾管、ハンドピースなどの中空器具の滅菌証明ができます。

※試験紙20枚同封

製品番号

99-109296

試験紙 1袋(20枚)

99-108332

試験紙 1袋(250枚)

STATMAT (スタットマット)

本体を安全に衛生的に保つシリコンマットです。本体の上部においてご使用ください。

製品番号


01-1128675

スタットマット Statim2000G4 用

01-1128685

スタットマット Statim5000G4 用

アクセサリ

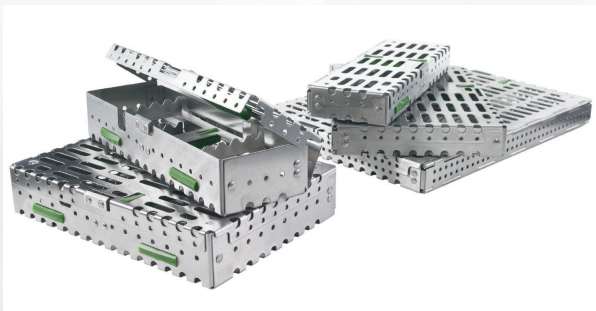

SysTMTM 器具用収納カセット



高品質サージカルステンレス製。耐久性を最大化し、変色を最小限に抑えるため、パシベーション(不動態膜)仕上げが施されています。



カセットの全て部品に対するメーカーの4年間保証と腐食に対する永久保証。



チェアから Hydrim (洗浄器)や滅菌器へカセットのまま設置可能なため効率的。



器具のセット毎の整理・収納が可能!

販売業者

コルテンジャパン合同会社
〒190-0012
東京都立川市曙町2丁目25-1
TEL: 042-595-6945
FAX: 042-595-6946
www.coltene.com

選任製造販売業者

AJMD 株式会社
〒103-0004
東京都中央区東日本橋2-4-5
真光ビルディング
TEL: 03-5614-0733
FAX: 03-5614-0734

製造業者

Scican Ltd.
1140 Don Mills Road
Toronto, Ontario M3B 3P9 Canada

販売名：ステイティムカセットオートクレーブ 医療器械認証番号：221AABZI00196000

COLTENE

SciCan
Your Infection Control Specialist™